

LYMPHATREX Expert

MANCHON


1- Positionner les repères anatomiques



Sélectionner les repères anatomiques nécessaires selon le modèle de vêtement choisi.

Positionner les repères sur la face interne du bras.


- C** Au point le plus fin du poignet
- C1** À 6 cm du repère C
- D** Au point le plus fort de l'avant-bras
- E** Au pli du coude
- F** Au point le plus fort du biceps
- G** Au creux axillaire
- H** Option couvre-épaule ou attache épaule : à l'acromion

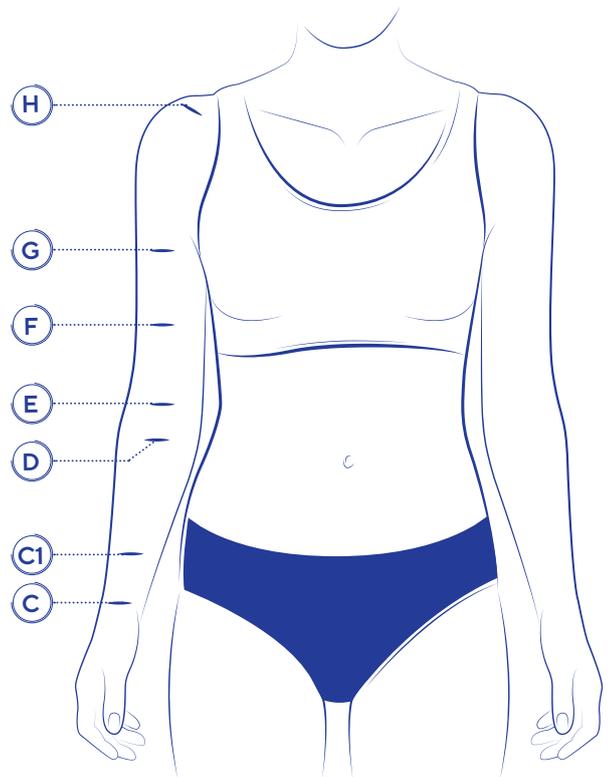

2- Mesurer les circonférences



Prendre les mesures en contact peau sans tirer sur le mètre ruban.

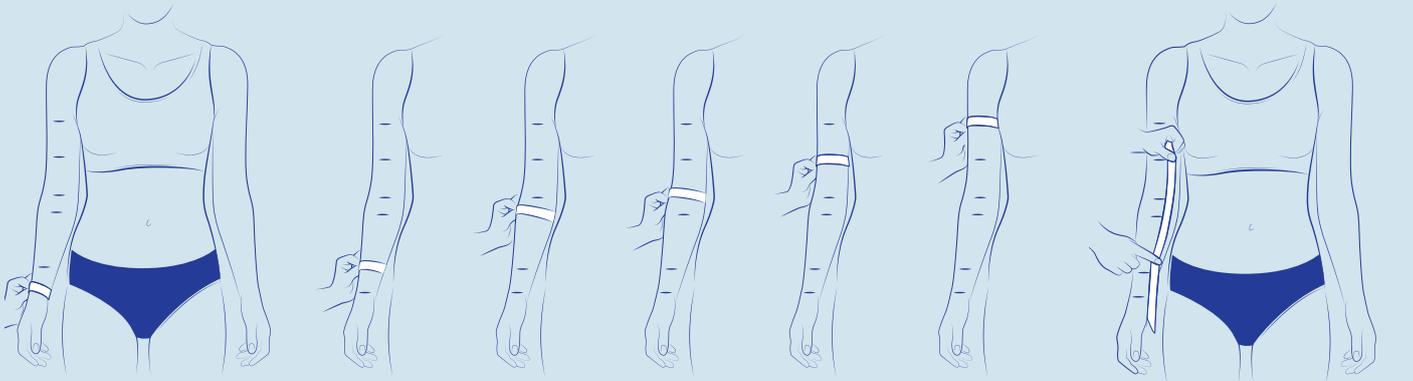

cC : ajouter 0,5 cm à la mesure pour plus de confort

cC1

cD

cE

cF


cG

Hauteurs du bras depuis le poignet : cC1 (6 cm), cD, cE, cF, cG


3- Mesurer les hauteurs



Prendre les mesures sur la face interne du bras, bras relâché, avec le mètre ruban posé sur la peau.

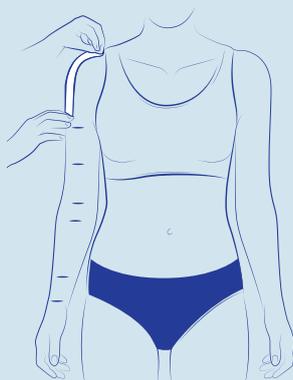

Option couvre-épaule ou attache épaule : distance entre le repère G et H (cGH)

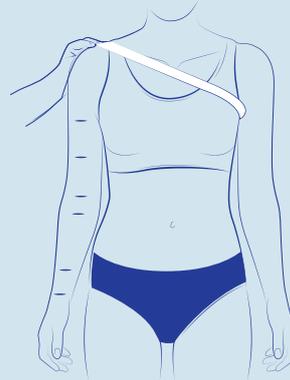

Option couvre-épaule : circonférence thoracique de l'acromion en passant sous le creu axillaire opposé (cH)