

# MOBIDERM® SUR-MESURE PATIENT

## MANCHON

### 1- Positionner les repères anatomiques



Sélectionner les repères anatomiques nécessaires selon le modèle de vêtement choisi.  
Positionner les repères sur la face externe du bras et la face dorsale de la main.



#### BRAS

- (C) Au point le plus fin du poignet
- (D) Au point le plus fort de l'avant bras
- (E) Au pli du coude
- (F) Au point le plus fort du biceps
- (G) Au creux axillaire
- (H) Point de la hauteur souhaitée à partir du point G, en cas d'ajout d'un haut en biais (entre 3 cm et 15 cm).

#### MAIN

- (B) Dans l'axe de la commissure de pouce
- (A) À la tête des métacarpes
- (X) Option avec pouce : à la commissure du pouce
- (Z) Option avec pouce : à l'arrêt souhaité du vêtement

Éviter d'arrêter le vêtement sur l'ongle ou sur une articulation

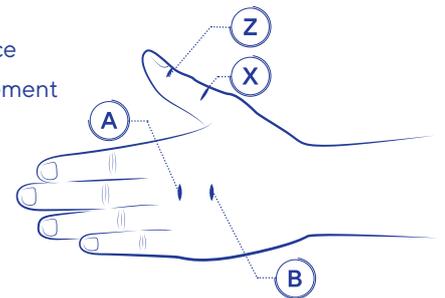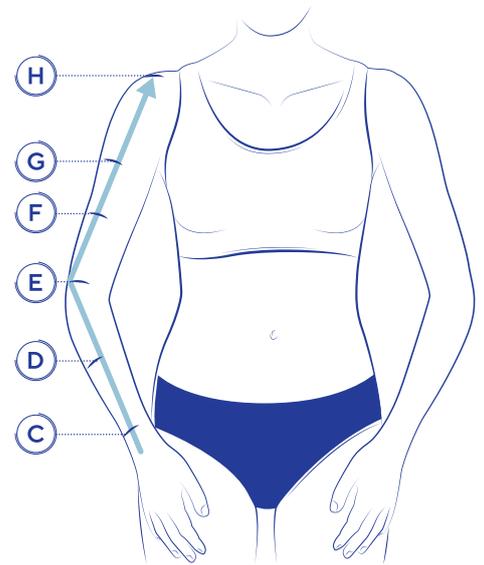


### 2- Mesurer les circonférences



Prendre les mesures en contact peau sans tirer sur le mètre ruban.

#### BRAS

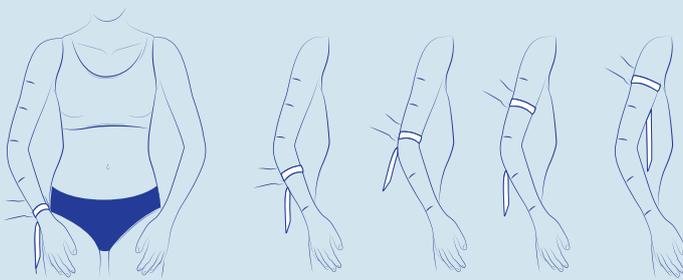

cC : ajouter 0,5 cm à la mesure pour plus de confort

cD


cE

cF

cG

#### MAIN

Option Pouce

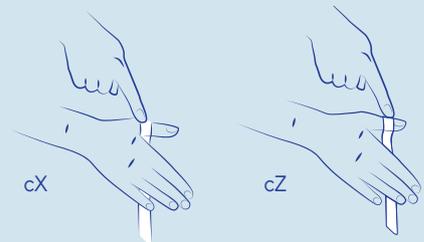

cX


cZ

### 3- Mesurer les hauteurs




Prendre les mesures sur la face externe du bras, bras légèrement fléchi, avec le mètre ruban posé sur la peau.  
Prendre les hauteurs du milieu du poignet jusqu'à la pointe du coude puis jusqu'au repère sous axillaire.

#### BRAS

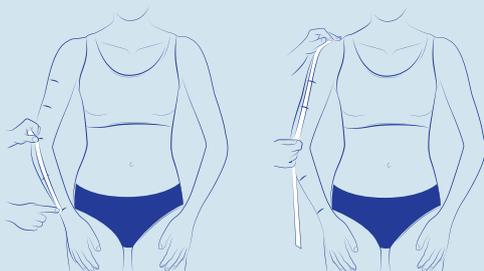

Hauteurs du bras depuis le poignet :  
dD, dE, dF, dG

#### MAIN

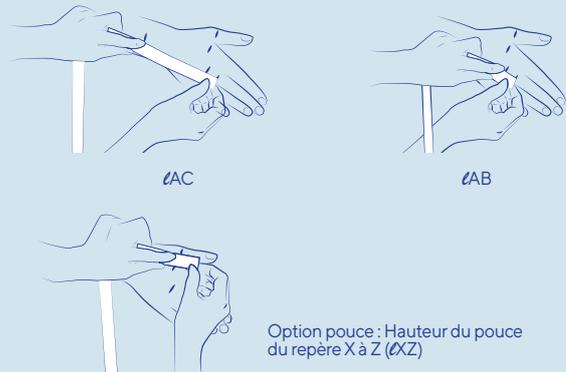

dAC

dAB

Option pouce : Hauteur du pouce du repère X à Z (dXZ)