



THUASNE®

MOBIDERM®

Produktübersicht



MOBIDERM®



Mobiderm® ist ein Medizinprodukt aus Schaumstoffwürfeln, das von Vliesbandagen umhüllt ist. Es gibt unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von **Mobiderm®**. Das Produkt wird entweder als Binde oder Platte unter der Kompressionsbandagierung eingesetzt oder direkt in die mobilisierende Kompressionsbekleidung eingearbeitet. Durch den Druckunterschied zwischen der würfelstrukturartigen Auflagefläche und der angrenzenden Umgebung wird der Lymphabfluss durch einen Mikromassageeffekt verbessert und die Wirksamkeit der Lymphdrainage verstärkt.

Mobiderm® Binden kommen unter einer Kompressionsbandagierung zur Anwendung. Sie erzeugen einen Druckunterschied zwischen der Auflagefläche der eingearbeiteten Würfelstruktur und der angrenzenden Umgebung, wodurch das Unterhautgewebe mobilisiert wird. Hierdurch wird das Ergebnis der manuellen Lymphdrainage nicht nur gehalten, sondern verstärkt. Die verwendeten Materialien ermöglichen größtmögliche Beweglichkeit während der Bandagierung und tragen so zu einem optimalen Therapieerfolg bei hoher Patientencompliance bei.

Effektiv

- Schnelle Reduzierung des Ödemvolumens
- Lockerung von fibrotischer, sklerotischer oder ödematöser Haut

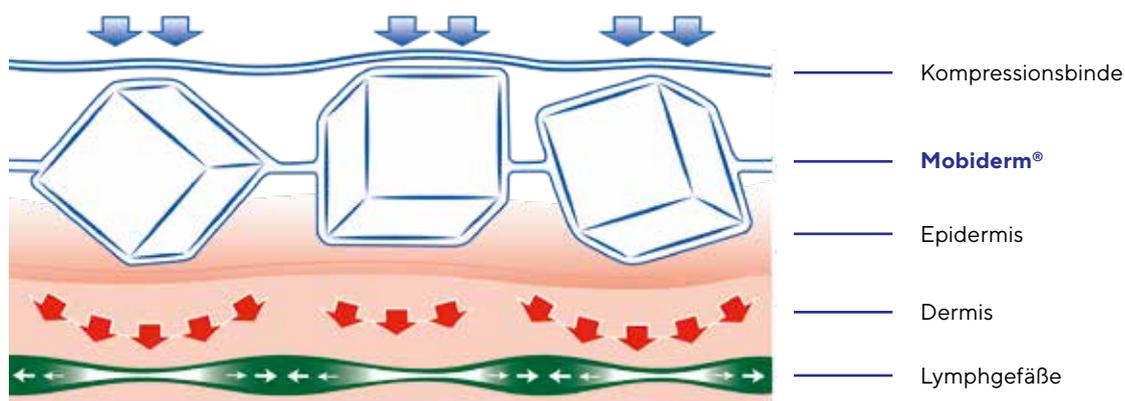
Praktisch

- Leicht, komfortabel und flexibel, der Patient behält seine Bewegungsfreiheit und die Lymphdrainage wird angeregt.

Komfortabel

- Weiche Hautauflage
- Anschmiegsam für verbesserten, anatomisch korrekten Sitz

Wirkprinzip Mobiderm®



MOBIDERM® AUTOFIT

Mit **Mobiderm® autofit** stabilisieren Patienten die Ergebnisse der Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie (KPE) – und das auch in Ruhephasen und über Nacht. Denn auch in der Erhaltungsphase ist es entscheidend, der betroffenen Extremität bzw. Körperregion kontinuierliche Ruhephasen in Form von sanfter Entstauung zu gönnen. Regelmäßig angewendet, verhindert **Mobiderm® autofit** den gefürchteten Rebound-Effekt: die Verschlimmerung der Symptome nach der Entstauung. Die Tagversorgung mit Kompressionsprodukten von Thuasne® wird optimal ergänzt.

Effektiv: Gute Stabilisierung des Volumens der entstauten Extremität – Lockerung von fibrotischer, sklerotischer oder ödematöser Haut durch den Mikromassage-Effekt.

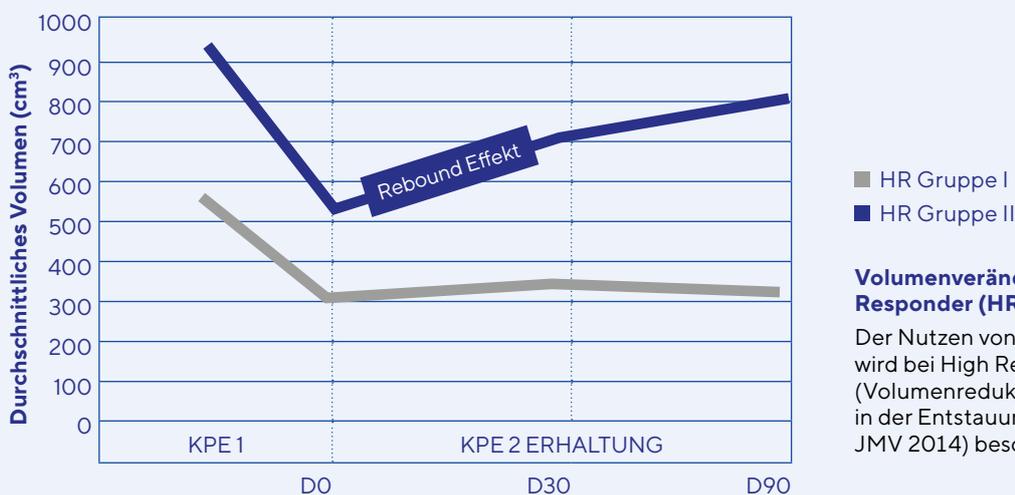
Praktisch: Leicht, komfortabel und flexibel – der Patient behält seine Bewegungsfreiheit und somit wird die Lymphdrainage angeregt.

Komfortabel: Weiche Hautauflage – anschmiegsam für verbesserten, anatomisch korrekten Sitz.

82% der Patienten, die bereits Kompressionskleidung tragen, bevorzugen laut der MARILYN-Studie¹

Mobiderm® autofit.

Mobiderm® autofit – die komfortable Lösung bei Lymphödemen: leicht anzulegen, bequem zu tragen, ohne aufwendiges Wickeln.






Volumenveränderungen bei High Responder (HR) Patienten (cm³)

Der Nutzen von **Mobiderm® autofit** wird bei High Responder Patienten (Volumenreduktion um mehr als 35% in der Entstauung, POLIT-Studie, JMV 2014) besonders deutlich.

¹ Quelle: S. Mestre^{1,2} & C. Calais¹ & G. Gaillard¹ & M. Nou¹ & M. Pasqualini³ & C. Ben Amor³ & I. Quere^{1,2,4}
Supportive Care in Cancer - DOI 10.1007/s00520-017-3652-5

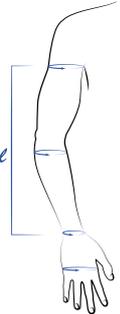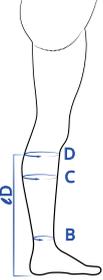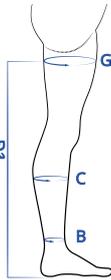MOBIDERM® AUTOFIT - Produktübersicht

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.																																			
	Mobiderm® autofit Armstrumpf <ul style="list-style-type: none"> mit Handansatz links oder rechts Farbe: beige 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Handumfang cm</th> <th>Handgelenkumfang cm</th> <th>Unterarmumfang (breiteste Stelle) cm</th> <th>Armumfang Achselbereich cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>17 - 21</td><td>15 - 19</td><td>22 - 28</td><td>25 - 32</td></tr> <tr><td>2</td><td>17 - 21</td><td>16 - 20</td><td>24 - 30</td><td>29 - 36</td></tr> <tr><td>3</td><td>18 - 22</td><td>17 - 21</td><td>26 - 32</td><td>33 - 40</td></tr> <tr><td>4</td><td>18 - 22</td><td>17 - 21</td><td>28 - 34</td><td>37 - 44</td></tr> <tr><td>5</td><td>19 - 23</td><td>18 - 22</td><td>30 - 36</td><td>41 - 48</td></tr> <tr><td>6</td><td>20 - 24</td><td>19 - 23</td><td>31 - 37</td><td>45 - 52</td></tr> </tbody> </table> <p>Länge: normal: ℓ 40 - 45 cm lang: ℓ 45 - 50 cm</p> 	Größe	Handumfang cm	Handgelenkumfang cm	Unterarmumfang (breiteste Stelle) cm	Armumfang Achselbereich cm	1	17 - 21	15 - 19	22 - 28	25 - 32	2	17 - 21	16 - 20	24 - 30	29 - 36	3	18 - 22	17 - 21	26 - 32	33 - 40	4	18 - 22	17 - 21	28 - 34	37 - 44	5	19 - 23	18 - 22	30 - 36	41 - 48	6	20 - 24	19 - 23	31 - 37	45 - 52	3733
Größe	Handumfang cm	Handgelenkumfang cm	Unterarmumfang (breiteste Stelle) cm	Armumfang Achselbereich cm																																		
1	17 - 21	15 - 19	22 - 28	25 - 32																																		
2	17 - 21	16 - 20	24 - 30	29 - 36																																		
3	18 - 22	17 - 21	26 - 32	33 - 40																																		
4	18 - 22	17 - 21	28 - 34	37 - 44																																		
5	19 - 23	18 - 22	30 - 36	41 - 48																																		
6	20 - 24	19 - 23	31 - 37	45 - 52																																		
	Mobiderm® autofit Wadenstrumpf <ul style="list-style-type: none"> seitengleich Farbe: beige 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Knöchelmaß cm (B)</th> <th>Wadenmaß cm (C)</th> <th>Abschlussmaß cm (D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>16 - 24</td><td>24 - 35</td><td>25 - 36</td></tr> <tr><td>2</td><td>20 - 28</td><td>32 - 43</td><td>32 - 43</td></tr> <tr><td>3</td><td>24 - 32</td><td>40 - 51</td><td>39 - 50</td></tr> <tr><td>4</td><td>28 - 36</td><td>48 - 59</td><td>46 - 57</td></tr> </tbody> </table> <p>Länge: kurz: ℓ (D) 38 - 40 cm normal: ℓ (D) 40 - 42 cm lang: ℓ (D) 42 - 44 cm Xtra lang: ℓ (D) 44 - 46 cm</p> 	Größe	Knöchelmaß cm (B)	Wadenmaß cm (C)	Abschlussmaß cm (D)	1	16 - 24	24 - 35	25 - 36	2	20 - 28	32 - 43	32 - 43	3	24 - 32	40 - 51	39 - 50	4	28 - 36	48 - 59	46 - 57	3734															
Größe	Knöchelmaß cm (B)	Wadenmaß cm (C)	Abschlussmaß cm (D)																																			
1	16 - 24	24 - 35	25 - 36																																			
2	20 - 28	32 - 43	32 - 43																																			
3	24 - 32	40 - 51	39 - 50																																			
4	28 - 36	48 - 59	46 - 57																																			
	Mobiderm® autofit Oberschenkelstrumpf <ul style="list-style-type: none"> seitengleich Farbe: beige 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Knöchelmaß cm (B)</th> <th>Wadenmaß cm (C)</th> <th>Oberschenkelmaß cm (G)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>16 - 24</td><td>24 - 35</td><td>46 - 57</td></tr> <tr><td>2</td><td>20 - 28</td><td>32 - 43</td><td>53 - 65</td></tr> <tr><td>3</td><td>24 - 32</td><td>40 - 51</td><td>61 - 72</td></tr> <tr><td>4</td><td>28 - 36</td><td>48 - 59</td><td>68 - 80</td></tr> </tbody> </table> <p>Länge: kurz: ℓ (G) 67 - 72 cm normal: ℓ (G) 72 - 77 cm lang: ℓ (G) 77 - 82 cm Xtra lang: ℓ (G) 82 - 87 cm</p> 	Größe	Knöchelmaß cm (B)	Wadenmaß cm (C)	Oberschenkelmaß cm (G)	1	16 - 24	24 - 35	46 - 57	2	20 - 28	32 - 43	53 - 65	3	24 - 32	40 - 51	61 - 72	4	28 - 36	48 - 59	68 - 80	3735															
Größe	Knöchelmaß cm (B)	Wadenmaß cm (C)	Oberschenkelmaß cm (G)																																			
1	16 - 24	24 - 35	46 - 57																																			
2	20 - 28	32 - 43	53 - 65																																			
3	24 - 32	40 - 51	61 - 72																																			
4	28 - 36	48 - 59	68 - 80																																			

Ebenfalls erhältlich: **Verordnungshilfe** Mobiderm® autofit mit Rezeptierungsbeispielen (DINlang-Format):



THUASNE®

**MOBIDERM®
AUTOFIT**

Starke Wirkung gegen den Rebound-Effekt bei Lymphödemen



Angewandte Kompression zur effektiven Volumenkontrolle bei Lymphödemem



Mobiderm® autofit Armstrumpf

1 Mobiderm® autofit Armstrumpf als zusätzliche Versorgung in der Erhaltungsphase, + entsprechende Lymphdiagnose*



Mobiderm® autofit Wadenstrumpf

1 Mobiderm® autofit Wadenstrumpf als zusätzliche Versorgung in der Erhaltungsphase, + entsprechende Lymphdiagnose*



Mobiderm® autofit Oberschenkelstrumpf

1 Mobiderm® autofit Oberschenkelstrumpf als zusätzliche Versorgung in der Erhaltungsphase, + entsprechende Lymphdiagnose*

* z. B. „zusätzl. Z.n. Mamma-Ca“...

Diese Artikel besitzen keine Hilfsmittelnummer und sind daher grundsätzlich frei verkäuflich. Einige Krankenkassen ermöglichen jedoch eine Abrechnung über die PZN. **Wichtig:** In diesem Fall erfolgt die Abrechnung nicht über die Verbandsmittelstelle, da das Produkt als Hilfsmittel eingestuft ist.

Thuasne Deutschland GmbH • Sydney Garden 9 • D-30539 Hannover • Tel. +49 511 20119-0 • Fax +49 511 20119-177 • kundenservice@thuasne.de • www.thuasne.de

MOBIDERM® AUTOFIT - Übersicht PZN-Nr.

Mobiderm® autofit Armstrumpf					
Größe	Ausführung	links		rechts	
		Art.-Nr.	PZN	Art.-Nr.	PZN
1	normal	37330420100262	13969607	37330420100261	13969599
	lang	37330620100272	13969636	37330420100271	13969613
2	normal	37330620200262	13969659	37330620200261	13969642
	lang	37330420200272	13969671	37330420200271	13969665
3	normal	37330420300262	13969694	37330420300261	13969688
	lang	37330420300272	13969719	37330620300271	13969702
4	normal	37330420400262	13969731	37330420400261	13969725
	lang	37330420400272	13969754	37330620400271	13969748
5	normal	37330420500262	13969777	37330420500261	13969760
	lang	37330420500272	13969814	37330620500271	13969808
6	normal	37330620600262	13969866	37330420600261	13969843
	lang	37330620600272	13969889	37330420600271	13969872

Mobiderm® autofit Wadenstrumpf			
Größe	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
1	kurz	37340320100231	13969895
	normal	37340320100232	13969903
	lang	37340320100233	13969926
	extra lang	37340320100234	13969932
2	kurz	37340320200231	13969949
	normal	37340320200232	13969955
	lang	37340320200233	13969961
	extra lang	37340520200234	13969978
3	kurz	37340520300231	13969984
	normal	37340320300232	13969990
	lang	37340520300233	13970007
	extra lang	37340320300234	13970013
4	kurz	37340520400231	13970036
	normal	37340320400232	13970042
	lang	37340320400233	13970059
	extra lang	37340320400234	13970065

Mobiderm® autofit Oberschenkelstrumpf			
Größe	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
1	kurz	37350320100231	13970071
	normal	37350320100232	13970088
	lang	37350320100233	13970094
	extra lang	37350320100234	13970102
2	kurz	37350320200231	13970119
	normal	37350520200232	13970125
	lang	37350520200233	13970131
	extra lang	37350520200234	13970148
3	kurz	37350320300231	13970160
	normal	37350520300232	13970177
	lang	37350520300233	13970183
	extra lang	37350520300234	13970214
4	kurz	37350320400231	13970220
	normal	37350320400232	13970237
	lang	37350320400233	13970243
	extra lang	37350320400234	13970266

MOBIDERM® INTIMATE

Eine Rundumversorgung für alle Körperbereiche

Die meisten chronischen Ödeme (einschließlich Lymphödeme) betreffen die oberen und unteren Gliedmaßen. Aber auch andere Körperregionen können betroffen sein, wie etwa der Thorax-, Brust- oder der Genitalbereich. Mit den **Mobiderm® Intimate**-Produkten bietet Thuasne® neue Versorgungsmöglichkeiten für Mamma- und Thoraxwand- sowie für Genital und Beckenödeme an.

Mobiderm® Intimate Shorts bei Genital- und Beckenödem																								
	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.																					
	Mobiderm® Intimate Shorts Frau <ul style="list-style-type: none"> Größen: 1 – 6 Farbe: schwarz-blau 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>cK (cm)</th> <th>cG (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>88 - 94</td><td>45 - 54</td></tr> <tr><td>2</td><td>95 - 101</td><td>48 - 58</td></tr> <tr><td>3</td><td>102 - 108</td><td>51 - 62</td></tr> <tr><td>4</td><td>109 - 115</td><td>54 - 66</td></tr> <tr><td>5</td><td>116 - 122</td><td>57 - 69</td></tr> <tr><td>6</td><td>123 - 129</td><td>60 - 72</td></tr> </tbody> </table>		cK (cm)	cG (cm)	1	88 - 94	45 - 54	2	95 - 101	48 - 58	3	102 - 108	51 - 62	4	109 - 115	54 - 66	5	116 - 122	57 - 69	6	123 - 129	60 - 72	3736
	cK (cm)	cG (cm)																						
1	88 - 94	45 - 54																						
2	95 - 101	48 - 58																						
3	102 - 108	51 - 62																						
4	109 - 115	54 - 66																						
5	116 - 122	57 - 69																						
6	123 - 129	60 - 72																						
	Mobiderm® Intimate Shorts Mann <ul style="list-style-type: none"> Größen: 1 – 6 Farbe: schwarz-blau 	cK: Gesäßumfang cG: Oberschenkelumfang	3737																					
																								
Mobiderm® Intimate BH bei Mamma- und Thoraxwandödem																								
	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.																					
	Mobiderm® Intimate BH <ul style="list-style-type: none"> Größen: XS - XL Farbe: nude mit 2 Taschen HMV-Nr. 05.11.04.1024 	Cupgrößen: AA/A, B/C, D/E Brustumfang in cm: XS (70-75) S (80-85) M (90-95) L (100-105) XL (110-115)	57 130																					



MOBIDERM® - Kompressionsprodukte

Entstauung, Erhaltung und Mobilisierung in der Lymphtherapie

Entstauung und Mobilisierung																																															
	Produkt/Beschreibung	Inhalt / Größen	Art.-Nr., PZN																																												
	Mobiderm® Kit 1 Arm	1 × Biflex 16 Binde 8 cm × 3 m · 1 × Biflex 16 Binde 8 cm × 5 m 1 × Cotton Short Stretch Binde 11 cm × 4 m 2 × Mobiderm® Binde 10 cm × 3 m (Würfelgröße 15 mm × 15 mm)	37009029999905 PZN 7034858																																												
	Mobiderm® Kit 2 Bein	1 × Biflex 16 Binde 8 cm × 3 m · 1 × Biflex 16 Binde 10 cm × 3 m 1 × Biflex 16 Binde 10 cm × 5 m · 2 × Cotton Short Stretch Binde 11 cm × 4 m 3 × Mobiderm® Binde 10 cm × 3 m (Würfelgröße 15 mm × 15 mm)	37009029999906 PZN 7034901																																												
	Cotton Short Stretch doppellagige Baumwollbinde • Farbe: weiß	11 cm × 4 m	01010101140000 PZN 11001043																																												
	Biflex 16 latexfreie Langzugbinde • mit Markierungen für korrekten Druckaufbau • Farbe: beige	8 cm × 3 m 8 cm × 5 m 10 cm × 3 m 10 cm × 5 m	16000200830002 PZN 11862584 16000200850002 PZN 11862590 16000201030002 PZN 11862609 16000201050002 PZN 11862615																																												
	Biflex Ideal elastische Kurzzugbinde • Farbe: weiß	3 cm × 5 m 8 cm × 5 m	11000200350000 PZN 11001066 11000200850000 PZN 11001095																																												
	Mobiderm® Binde • Farbe: weiß	10 cm × 3 m (Würfelgröße 15 mm × 15 mm)	37200101030002 PZN 11862621																																												
	Mobiderm® Platten • Farbe: weiß	100 cm × 25 cm Kleine Würfel (5 mm × 5 mm) 100 cm × 20 cm Große Würfel (15 mm × 15 mm)	37100103310001 PZN 11001020 37100103310002 PZN 11001037																																												
Selbstmanagement																																															
	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.																																												
	Mobiderm® Armstrumpf • seitengleich • Farbe: beige	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Handgelenk- umfang cm</th> <th>Ellenbogenumfang cm</th> <th>Oberarmumfang cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td>22 – 25</td><td>25 – 29</td></tr> <tr><td>1+</td><td>14 – 16</td><td>24 – 27</td><td>28 – 32</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>25 – 28</td><td>29 – 33</td></tr> <tr><td>2+</td><td>16 – 18</td><td>27 – 30</td><td>31 – 35</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>28 – 31</td><td>32 – 36</td></tr> <tr><td>3+</td><td>18 – 20</td><td>30 – 33</td><td>35 – 39</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>31 – 34</td><td>35 – 39</td></tr> <tr><td>4+</td><td>20 – 22</td><td>33 – 36</td><td>38 – 42</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>34 – 37</td><td>38 – 42</td></tr> <tr><td>5+</td><td>22 – 24</td><td>36 – 39</td><td>41 – 45</td></tr> </tbody> </table> <p>Länge: normal: bis 165 cm Körpergröße lang: ab 165 cm Körpergröße</p>	Größe	Handgelenk- umfang cm	Ellenbogenumfang cm	Oberarmumfang cm	1		22 – 25	25 – 29	1+	14 – 16	24 – 27	28 – 32	2		25 – 28	29 – 33	2+	16 – 18	27 – 30	31 – 35	3		28 – 31	32 – 36	3+	18 – 20	30 – 33	35 – 39	4		31 – 34	35 – 39	4+	20 – 22	33 – 36	38 – 42	5		34 – 37	38 – 42	5+	22 – 24	36 – 39	41 – 45	3730 
Größe	Handgelenk- umfang cm	Ellenbogenumfang cm	Oberarmumfang cm																																												
1		22 – 25	25 – 29																																												
1+	14 – 16	24 – 27	28 – 32																																												
2		25 – 28	29 – 33																																												
2+	16 – 18	27 – 30	31 – 35																																												
3		28 – 31	32 – 36																																												
3+	18 – 20	30 – 33	35 – 39																																												
4		31 – 34	35 – 39																																												
4+	20 – 22	33 – 36	38 – 42																																												
5		34 – 37	38 – 42																																												
5+	22 – 24	36 – 39	41 – 45																																												
	Mobiderm® Handschuh ohne Finger • seitengleich • Farbe: beige	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Handgelenk- umfang cm</th> <th>Handumfang cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>14 – 16</td><td>15 – 17</td></tr> <tr><td>2</td><td>16 – 18</td><td>17 – 19</td></tr> <tr><td>3</td><td>17 – 19</td><td>19 – 21</td></tr> <tr><td>4</td><td>19 – 21</td><td>21 – 23</td></tr> <tr><td>5</td><td>20 – 22</td><td>23 – 25</td></tr> <tr><td>6</td><td>21 – 23</td><td>25 – 27</td></tr> </tbody> </table>	Größe	Handgelenk- umfang cm	Handumfang cm	1	14 – 16	15 – 17	2	16 – 18	17 – 19	3	17 – 19	19 – 21	4	19 – 21	21 – 23	5	20 – 22	23 – 25	6	21 – 23	25 – 27	3731 																							
Größe	Handgelenk- umfang cm	Handumfang cm																																													
1	14 – 16	15 – 17																																													
2	16 – 18	17 – 19																																													
3	17 – 19	19 – 21																																													
4	19 – 21	21 – 23																																													
5	20 – 22	23 – 25																																													
6	21 – 23	25 – 27																																													
	Mobiderm® Handschuh • links oder rechts • Farbe: beige		3732																																												

WINGS FOR YOUR HEALTH

Thuasne Deutschland GmbH

Sydney Garden 9 · D-30539 Hannover
Tel.: +49 511 20119-0 · Fax: +49 511 20119-177
kundenservice@thuasne.de · www.thuasne.de

Hauptstraße 16 · D-35099 Burgwald
Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980

Kundenservice-Hotline:
Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
Tel.: +49 511 20119-0 · Fax: +49 511 20119-177
kundenservice@thuasne.de

Alle in diesem Dokument genannten Medizinprodukte sind gemäß der europäischen Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte CE-gekennzeichnet, sofern sie nicht ausdrücklich als „NICHT CE-MARKIERT“ gekennzeichnet sind. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, Indikationen und Kontraindikationen des Produkts sorgfältig durch.
Stand: 04/2025. Thuasne Deutschland GmbH, D-30539 Hannover



TM134912BDD04.1.0.2025-05