

LYMPHATREX Revolution

MANCHON DE BRAS

1- Positionner les repères anatomiques




Sélectionner les repères anatomiques nécessaires selon le modèle de vêtement choisi.

Positionner les repères sur la face interne du bras.

- (C) Au point le plus fin du poignet
- (C1) À 6 cm du repère C
- (D) Au point le plus fort de l'avant-bras
- (E) Au pli du coude
- (F) Au point le plus fort du biceps
- (G) Au creux axillaire

*Le bras doit être relâché, en très légère flexion.
Important, les hauteurs se prennent sur la face interne du bras.*

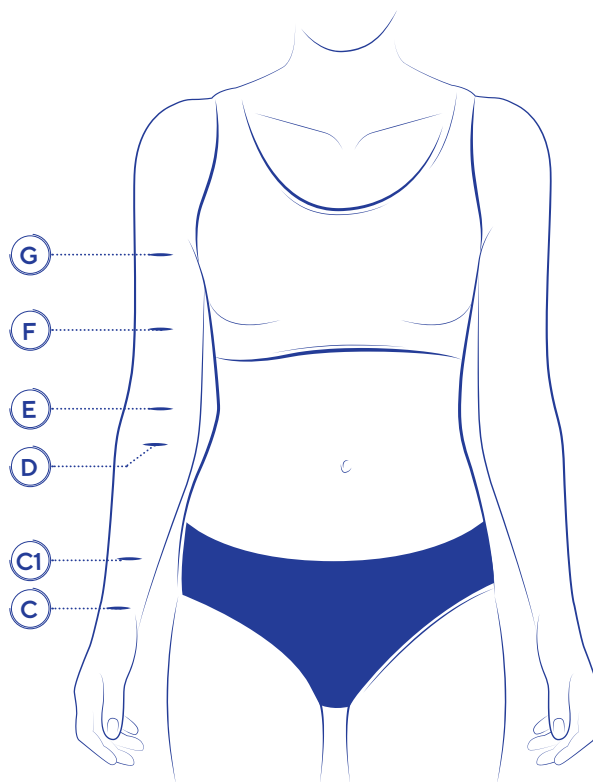

2- Mesurer les circonférences

