



THUASNE®

COMPRESSION CARE

**Venoflex
Lymphatrex
Mobiderm®
Cicatrex**



Helfen ist unsere Leidenschaft.

Der Wunsch, anderen zu helfen, liegt in unserer Familientradition begründet. Diesem Ziel fühlt sich unsere Thuasne® Group bis heute leidenschaftlich verpflichtet und das beweisen wir täglich, auf der ganzen Welt, als einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel.

Besonders stolz sind wir auf unser breites Sortiment an Produkten für die Kompressionstherapie. So ist der Name Cicatrex seit Jahrzehnten ein Synonym für hoch-funktionelle Maß-Versorgungen in der Narbenbehandlung, die mit ihren vielfältigen Ausstattungsoptionen Garant für eine überzeugende Kombination aus Tragekomfort und medizinischer Wirksamkeit sind. Diese Benchmark haben wir mit der neuen Produkt-Serie Cicatrex Contour, speziell entwickelt für den Einsatz nach plastisch-ästhetischen Eingriffen, ein weiteres Mal nach oben verschoben.

Höchstleistungen können Sie auch im Bereich der Ödemtherapie von uns erwarten. Lymphatrex und Mobiderm® setzen Maßstäbe in puncto Qualität und Wirksamkeit. Sie vereinen anpassungsfähige Ausstattung mit angenehmer Haptik und bieten so eine ideale Grundlage für eine erfolgreiche Behandlung. Dazu gehören auch unsere neuen Lymphatrex und Cicatrex Farben, die sich stilgerecht kombinieren lassen.

In der Phlebologie können Sie in unserem umfangreichen Portfolio zwischen Venoflex Maß- und Serien-Kompressionsstrümpfen und -strumpfhosen wählen.

Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Spezialisten, Patienten und den Forschungszentren unserer Thuasne® Group sorgen wir permanent für höchste Standards bei der Entwicklung und Produktion medizinischer Kompressionskleidung. Sie bildet die Grundlage für eine Vielzahl nachhaltiger Innovationen. Auf diese Weise garantieren wir Ihnen herausragende Thuasne®-Qualität und freuen uns, Ihnen als zuverlässiger Partner helfen zu können, anderen zu helfen!

Herzliche Grüße




Elizabeth Ducottet
Président Directeur Général



Inhalt

	Seite
Über Thuasne®	4 – 9
VENENTHERAPIE: Venoflex	10 – 19
ÖDEMTERAPIE: Lymphatrex, Mobiderm®	20 – 35
NARBENTHERAPIE: Cicatrex	36 – 49
Silima® und Breastcare-Produkte	50 – 51
Anziehhilfen	52 – 53
Bestellmöglichkeiten	54 – 55
Allgemeine Informationen	56 – 57

Wings for your health

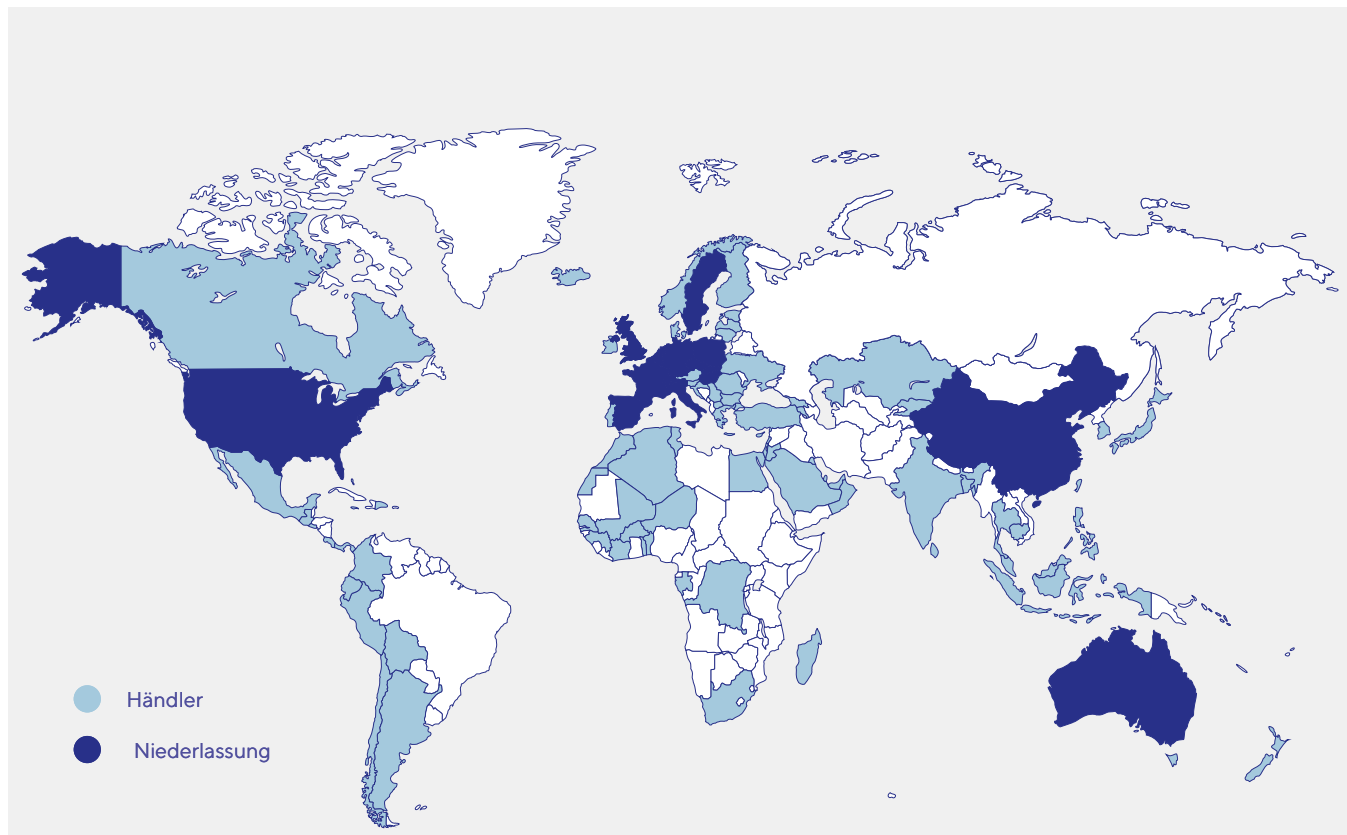

Globales Netzwerk
8 eigene Produktionsstätten
und 20 Niederlassungen weltweit

Standortvorteil
In Deutschland passgenau gefertigt

Erfahrungsschatz
Thuasne® steht für 178 Jahre Kompetenz im
Bereich medizinischer Textilien

Wir denken global und handeln lokal.



Als Teil der Thuasne® Gruppe gehört Thuasne Deutschland zu den international erfolgreichsten Anbietern medizinischer Hilfsmittel. Die Geschichte der familiengeführten Unternehmensgruppe begann vor 178 Jahren in Paris. Heute verfügt die Thuasne® Group über weltweite Niederlassungen sowie etliche Forschungszentren und Produktionsstätten in Europa und den USA.

Allein in Deutschland arbeiten über 200 der weltweit 2.400 Mitarbeiter an innovativen Lösungen für mehr Lebensqualität und Gesundheit. In unseren beiden deutschen Produktionsstätten entstehen qualitativ hochwertige medizinische Hilfsmittel nach Maß und in serieller Anfertigung.

Die soziale Verantwortung unseres Unternehmens (Corporate Social Responsibility - CSR) ist Bestandteil unserer Geschäftsstrategie:



Ausgezeichnetes Unternehmen

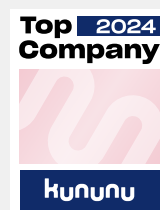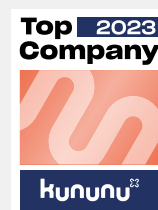

Ausgezeichnetes Design in verschiedenen Produktgruppen



Thuasne® in Zahlen



2.400

Mitarbeiter weltweit



Ein Fußabdruck in
110 Ländern



17

Industriestandorte in Europa,
Nordamerika und Afrika.



23.000

B2B Kunden



15 Millionen

Kilometer Garn



5.700 km

jährlich verarbeitete Textilien



Alle **2 Sekunden**
wird irgendwo auf der Welt
ein Thuasne® Produkt gekauft


Know-how trifft auf Präzision

Unser Ziel ist die Entwicklung und Produktion erstklassiger Kompressionsbekleidung, um die individuelle phlebologische und lymphologische sowie die Verbrennungs- und Narbentherapie der Patienten bestmöglich unterstützen zu können.

Zu unserem Produktportfolio zählen starke Marken wie **Venoflex**, **Lymphatrex**, **Mobiderm®** und **Cicatrex**, die alle Anwendungsbereiche der modernen Kompressionstherapie abdecken. Sämtliche medizinischen Hilfsmittel aus dem Hause Thuasne® zeichnen sich durch eine präzise Serien- und Maß-Verarbeitung und den Einsatz hochwertigster Materialien aus.

Das durch jahrelange Entwicklungsarbeit gewonnene Wissen über Produktionsverfahren und spezielle Strick- und Webtechniken ist unser Schlüssel zum Erfolg.



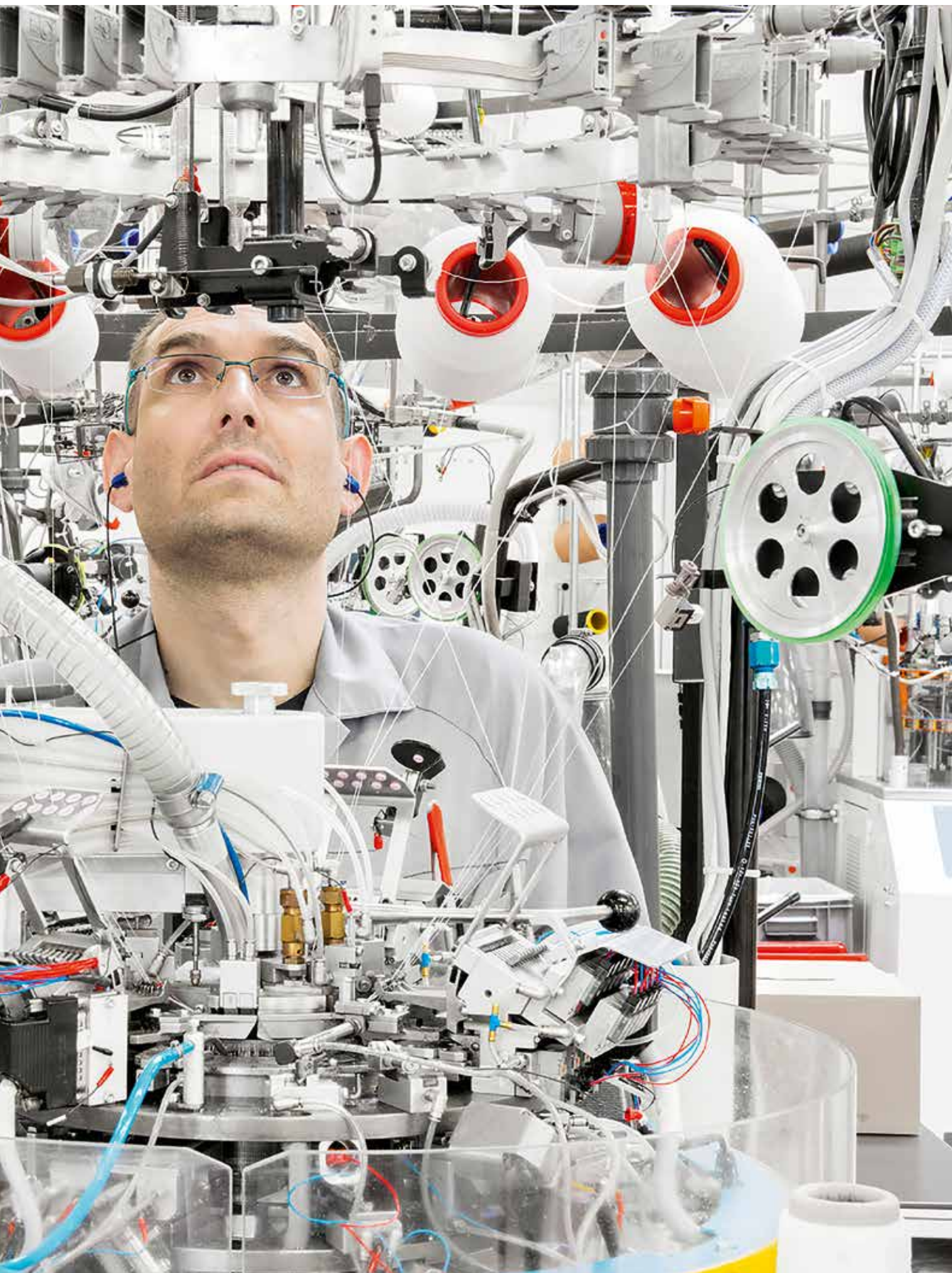


Kompressionsklassen

Die Therapie mit medizinischen Kompressionsstrümpfen ist zentraler Bestandteil der erfolgreichen Behandlung von Thrombosen, Lip- oder Lymphödemen und fortgeschrittenen Venenerkrankungen.

Ihre besondere Wirkung entfalten die Kompressionsstrümpfe durch den Druck, den sie auf das zu behandelnde Gewebe ausüben. Der Druck verkleinert den Querschnitt der Blutbahnen, was die Fließgeschwindigkeit des Blutes erhöht und die Funktion der Venenklappen unterstützt. Zugleich verhindert der Druck übermäßige Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe und führt damit zu einer spürbaren Erleichterung.

Der optimale Druck für eine erfolgreiche Behandlung wechselt je nach Therapieform und ist in vier Kompressionsklassen eingeteilt. Die höchste Klasse bietet dabei die stärkste Kompression.



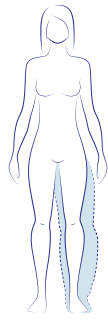

UNTERE EXTREMITÄTEN



KKL 1

geringer Druck

Med. Kompressions- beinstrümpfe (leicht)

18–21 mmHg

Indikationen: Lymphödem bei Nebenerkrankungen (z.B. Hypertonie, pAVK, entzündlich rheumatische Erkrankungen), Inaktivitätsödem, Versorgung des kindlichen Lymphödems ab dem 18. Lebensmonat, beginnende Schwangerschaftsvarikosis



KKL 2

mittelstarker Druck

Med. Kompressions- beinstrümpfe (mittel)

23–32 mmHg

Indikationen: Primäres und sekundäres Beinlymphödem Stadium I und II, Genitallymphödem, Lipödem, phlebolymphodynamische und statische Insuffizienz, post-traumatische und postoperative Ödeme, mäßige bis stärkere Schwangerschaftsvarikosis, postthrombotisches Syndrom



KKL 3

starker Druck

Med. Kompressions- beinstrümpfe (kräftig)

34–46 mmHg

Indikationen: Primäres und sekundäres Beinlymphödem Stadium II und III, Lipödem, phlebolymphostatische Insuffizienz



KKL 4

sehr starker Druck

Med. Kompressions- beinstrümpfe (sehr kräftig)

> 49 mmHg

Indikationen: Primäres und sekundäres Beinlymphödem Stadium II und III, Lipödem



OBERE EXTREMITÄTEN

Med. Kompressions- armstrümpfe (leicht)

15–21 mmHg

Indikationen: Primäres und sekundäres Armlymphödem Stadium I, Inaktivitätsödem (z.B. Zustand nach Schlaganfall)

Med. Kompressions- armstrümpfe (mittel)

23–32 mmHg

Indikationen: Primäres und sekundäres Armlymphödem Stadium I und II, post-thrombotisches Syndrom

Med. Kompressions- armstrümpfe (kräftig)

34–46 mmHg

Indikationen: Primäres und sekundäres Armlymphödem Stadium II und III

Venentherapie

Die Kompressionsstrümpfe **Venoflex Micro** und **Venoflex Elegance** wurden für die individuellen Ansprüche und Bedürfnisse der Patienten konzipiert. Sie sind als Serien- oder Maßanfertigung, in ansprechenden Farben und in unterschiedlichen Längen – vom Wadenstrumpf bis zur Strumpfhose – erhältlich.

Beide Produktserien begeistern durch Farbtiefe und Brillanz, da ausschließlich durchgefärbte Garne verwendet werden. Dank der besonderen Materialauswahl und Weichheit gestaltet sich das An- und Ausziehen der Kompressionsstrümpfe besonders einfach. Die Strümpfe sind zudem sehr hautfreundlich, pflegeleicht und bequem.

Die **Venoflex men** Kompressionsstrümpfe wurden speziell für Männer entwickelt und bieten durch ihren nahtlosen, soften Abschlussbund ein komfortables Tragegefühl sowie leichtes Anziehen.

Der hohe Baumwollanteil sorgt für Hautfreundlichkeit und thermoregulierende Eigenschaften, die sich ideal an die Bedürfnisse der Patienten anpassen.





Venoflex Micro

Der elegante Kompressionsstrumpf mit besonders hohem Tragekomfort


Venoflex Micro ist ein feinfädiger, medizinischer Kompressionsstrumpf, der sich durch seine außergewöhnlich anschmiegsame Struktur und das spezielle Abschlussbündchen dem Bein perfekt anpasst und ein besonders angenehmes Tragegefühl garantiert.

Optisch kaum von einem handelsüblichen Strumpf zu unterscheiden, entfaltet **Venoflex Micro** beim Tragen unsichtbar seine therapeutische Wirkung. Dank der dezenten Farbauswahl passt dieser Kompressionsstrumpf zu jedem Outfit.


Bei den Haftbändern zeigt sich **Venoflex Micro** von seiner flexiblen Seite. Kunden können zwischen verschiedenen Haftbändern wählen.

Die Microfaserstrümpfe werden mit einer stabil umrandeten Y-Ferse, einer flachen Naht am Haftband sowie wahlweise mit offener oder geschlossener Fußspitze hergestellt. Bei Bedarf sind die Strümpfe dieser Serie auch als Maßstrümpfe erhältlich.


Farben

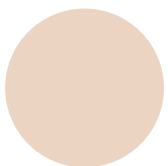


Hell

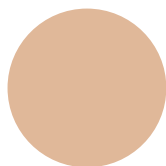

Caramel

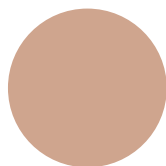

Mode

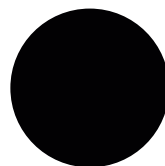

Schwarz



Kompressionsklassen



KKL 1



KKL 2

VENOFLEX Elegance

Der Allrounder

Venoflex Elegance ist ein moderner Unisex-Alltagsstrumpf. Er ist durch seine auf Langlebigkeit und Funktionalität ausgerichteten Konstruktionsmerkmale der perfekte Begleiter im Alltag.

Dieser Strumpf wird mit einem doppelt umspinnenen Kompressionsfaden gefertigt und erweist sich dadurch als äußerst strapazierfähig.


Aufgrund seines Microfaseranteils und der komfortablen Abschlussbündchen wirkt **Venoflex Elegance** besonders geschmeidig und hautfreundlich und kann auch von Allergikern bedenkenlos getragen werden.

Ebenso wie bei **Venoflex Micro** kann auch hier zwischen einem Spitzen- und einem Noppenhaftband gewählt werden.


Alle Modelle werden mit offener oder geschlossener Fußspitze und einer stabil umrandeten Y-Ferse angefertigt und sind auch als Maßstrümpfe verfügbar.




Farben

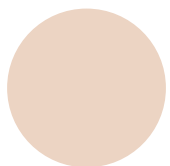


Hell

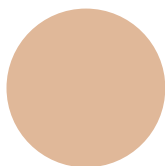


Caramel

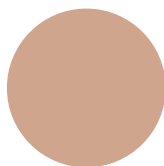


Mode

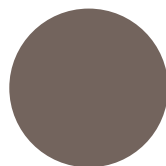

Diamant

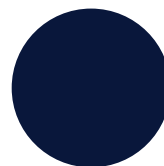

Marine

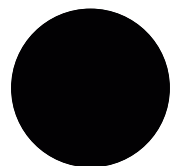

Schwarz



Kompressionsklassen



KKL 1



KKL 2



KKL 3

Venoflex men

Kompressionsstrümpfe für Männer

Starker Support, stilsicher und entspannt!

Medizinische Kompressionsstrümpfe sind fester Bestandteil einer jeden **Venenbehandlung**. Hierbei trifft oft, v.a. bei Männern, die Notwendigkeit der medizinischen Wirksamkeit auf den Wunsch einer möglichst unauffälligen Bestrumpfung.


Genau hier setzt der medizinische Kompressionsstrumpf **Venoflex men** an und wurde speziell für die Bedürfnisse der männlichen Patienten konzipiert.

Die ausgeklügelte Stricktechnik mit **nahtlosem und softem Abschlussbund** erleichtert das Anziehen. Der Kompressionsstrumpf schmiegt sich angenehm an das Bein.


Der **hohe Baumwollanteil** sorgt für ein angenehmes, hautfreundliches Tragegefühl – innen als auch außen. Zusätzlich verfügt diese strapazierfähige Materialkomponente über eine thermoregulierende Wirkung und passt sich somit an die Bedürfnisse des Patienten an.




Hoher Anteil
an natürlicher Baumwolle

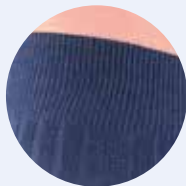

Breites und
nahtloses Abschlussband

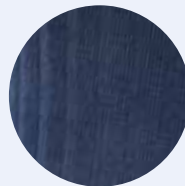


Elegante und unauffällige
Rippstruktur

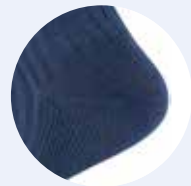


Verstärkte Ferse

Farben

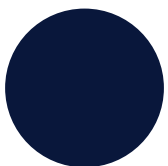

Marine

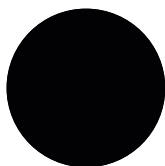

Schwarz



- **Unauffällig** und doch **stark** in seiner therapeutischen Wirkung.
- Eine zeitlose Farbauswahl – marine und schwarz – die **schnell und einfach zu jedem Anlass** und Kleidungsstil kombiniert werden kann.
- **Durchgehender Tragekomfort** dank natürlicher **Baumwolle**.

Kompressionsklassen



Venoflex

HAFTBÄNDER

Venoflex Elegance und Venoflex Micro Haftbänder gibt es in einer Spitzen- und einer Noppenvariante. Die flachen Nähte und die hautfreundlichen, gerundeten Noppen garantieren ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig unterstützen sie den perfekten Sitz des Strumpfes.



DETAILS



Stabile, umrandete Y-Ferse



Abschluss ohne Naht bei
offener Fußspitze



SERIENVERSORGUNG



MICRO: KKL 1 KKL 2



Kniestrumpf (AD)

offene oder geschlossene Spitze

(KKL 1)	Micro	17.06.01.0114
(KKL 2)	Micro	17.06.01.1217
(KKL 2)	Elegance	17.06.01.1025
(KKL 2)	Men	17.06.01.1234



ELEGANCE: KKL 2



Schenkelstrumpf (AG, AG+)

offene oder geschlossene Spitze, inkl. Haftband

(KKL 1)	Micro	17.06.03.0101
(KKL 2)	Micro	17.06.03.1205
(KKL 2)	Elegance	17.06.03.1016



MEN: KKL 2



Hose (AT)

offene oder geschlossene Spitze

(KKL 1)	Micro	17.06.04.0106
(KKL 2)	Micro	17.06.04.1173
(KKL 2)	Elegance	17.06.04.1020



Umstandshose (AT/U)

offene oder geschlossene Spitze

(KKL 1)	Micro	17.06.04.0106
(KKL 2)	Micro	17.06.04.1173
(KKL 2)	Elegance	17.06.04.1020



MASSVERSORGUNG



MICRO: KKL 1 KKL 2



Kniestrumpf (AD)

(KKL 1)	Micro	17.06.10.0082
(KKL 2)	Micro	17.06.10.1123
(KKL 1)	Elegance	17.06.10.0045
(KKL 2)	Elegance	17.06.10.1080
(KKL 3)	Elegance	17.06.10.2026



Hose/Herrenhose (AT, AT/H)

(KKL 1)	Micro	17.06.13.0072
(KKL 2)	Micro	17.06.13.1112
(KKL 1)	Elegance	17.06.13.0041
(KKL 2)	Elegance	17.06.13.1072
(KKL 3)	Elegance	17.06.13.2024



ELEGANCE: KKL 1 KKL 2 KKL 3



Halbschenkelstrumpf (AF)

(KKL 1)	Micro	17.06.11.0058
(KKL 2)	Micro	17.06.11.1089
(KKL 1)	Elegance	17.06.11.0031
(KKL 2)	Elegance	17.06.11.1056
(KKL 3)	Elegance	17.06.11.2020



Einbeinhose (AT/E)

(KKL 1)	Micro	17.06.13.0072
(KKL 2)	Micro	17.06.13.1112
(KKL 1)	Elegance	17.06.13.0041
(KKL 2)	Elegance	17.06.13.1072
(KKL 3)	Elegance	17.06.13.2024



Schenkelstrumpf (AG)

(KKL 1)	Micro	17.06.12.0075
(KKL 2)	Micro	17.06.12.1114
(KKL 1)	Elegance	17.06.12.0043
(KKL 2)	Elegance	17.06.12.1078
(KKL 3)	Elegance	17.06.12.2024



Umstandshose (AT/U)

(KKL 1)	Micro	17.06.13.0072
(KKL 2)	Micro	17.06.13.1112
(KKL 1)	Elegance	17.06.13.0041
(KKL 2)	Elegance	17.06.13.1072
(KKL 3)	Elegance	17.06.13.2024

Ödemtherapie

Die Kompression ist eine tragende Säule jeder Ödemtherapie und ein wesentlicher Schlüssel zum Behandlungserfolg.

Dank unserer medizinischen und technischen Expertise im Bereich der Narbentherapie ist es uns gelungen, sämtliche Kompressionsversorgungen mit höchstem Tragekomfort und Designanspruch auszustatten und alltags-tauglich zu entwickeln.

Lymphatrex bietet maßgefertigte Kompressionstextilien, für eine nachhaltige Therapie und eine Strickkonstruktion, die ein leichtes An- und Ausziehen ermöglicht. Dank der erweiterten Farbauswahl und der glatten Oberfläche passen **Lymphatrex**-Produkte zu allen Kleidungsstilen und Gelegenheiten. Alle verwendeten Materialien sind hautfreundlich, salbenresistent, atmungsaktiv und für Allergiker geeignet.

Mobiderm® ist unser innovatives Konzept für eine erfolgreiche Ödemtherapie. Das patentierte Bandagenmaterial mobilisiert das Unterhautgewebe und erweist sich sowohl bei der Entstauungsphase als auch bei der Erhaltungsphase als äußerst effizient. Das **Mobiderm®** autofit System erlaubt die manuelle Kontrolle des Ödems durch die Patienten und passt sich den individuellen Bedürfnissen an.





Versorgungsmöglichkeiten

Lymphödem- und Lipödem*-Stadien



**Stadium 1
SPONTAN REVER-
SIBLES STADIUM**

Das Ödem zeigt sich als sicht- und tastbare, weiche Schwellung, die sich nach Hochlagerung der Beine zurückbildet. Das Gewebe lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken.



**Stadium 2
SPONTAN IRREVER-
SIBLES STADIUM**

Das Ödem zeigt sich dauerhaft und ist durch die zunehmende Fibrosierung kaum noch dellbar. Es können Schmerzen und Bewegungseinschränkungen auftreten.



Stadium 3

Starke Zunahme des Ödems mit zum Teil extremer Schwellung.

LYMPHÖDEM

LIPÖDEM*

Glatte Hautoberfläche mit einer gleichmäßig verdickten Subkutanschicht, das Unterhautgewebe ist feinknotig mit weicher Konsistenz.

Die Hautoberfläche ist uneben, subkutan sind größere Knoten tastbar.

Ausgeprägte Volumenzunahme insbesondere im medialen und lateralen Oberschenkelbereich und deformierende Fettgewebewülste.

*Hinweis zur Lipödem-Stadieneinteilung:

Die aktuelle S2k-Leitlinie zum Lipödem (2024) empfiehlt, den Schweregrad nicht allein anhand des Haut- und Fettgewebe-Erscheinungsbildes zu bestimmen. Vielmehr sollen individuelle Beschwerden und funktionelle Einschränkungen der Patientin berücksichtigt werden. Zudem ist das Lipödem nicht zwangsläufig fortschreitend und hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Da die Stadieneinteilung in der Praxis weiterhin gebräuchlich ist, wird sie hier zur Orientierung dargestellt. Für detaillierte Informationen verweisen wir auf die offizielle S2k-Leitlinie, die auf der Webseite der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) frei zugänglich ist.

VERSORGUNG MIT:

Lymphatrex Fine > **jetzt: Lymphatrex Support**
Lymphatrex Poly > **demnächst: Lymphatrex Control**
Lymphatrex Poly Strong > **demnächst: Lymphatrex Lead**



OBERE EXTREMITÄTEN: SUPPORT KKL 1/POLY KKL 2

UNTERE EXTREMITÄTEN: POLY KKL 2/POLY STRONG KKL 2

UNTERE EXTREMITÄTEN: POLY STRONG KKL 3



KPE¹2 Erhaltungsphase Tagversorgung

Die hochwertigen Textilmaterialien sind aufgrund ihrer Kompressionswirkung und kurzzügigen Dehnungseigenschaften besonders geeignet zur Therapie von Ödemen.

Bei der Entwicklung von **Lymphatrex** kam uns der intensive Austausch mit Patienten und Wissenschaftlern und die umfassende Erfahrung in der Herstellung von Kompressionstextilien zugute, die wir mit der Versorgung zur Venen- und Narbentherapie gesammelt haben.

Qualitäten

Lymphatrex Fine, jetzt Lymphatrex Support

75 % Polyamid, 25 % Elasthan, Kl. 2
Hoher Tragekomfort, leichtes Anziehen.
Ödeme bis Stadium 2


Lymphatrex Poly, demnächst Lymphatrex Control

82 % Polyamid, 18 % Elasthan, Kl. 2
Leichtes Anziehen, schnelles Trocknen.
Ödeme bis Stadium 2


Lymphatrex Poly Strong, demnächst Lymphatrex Lead

73 % Polyamid, 27 % Elasthan, Kl. 2, 3
Schnelles Trocknen. Ödeme bis Stadium 3


Farbe

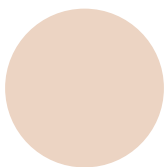


Beige

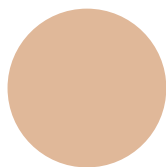


Caramel

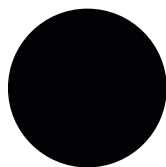


Schwarz

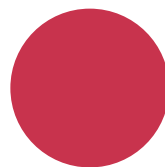


Rot

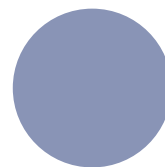


Jeans

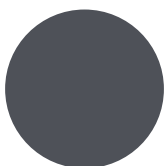


Anthrazit

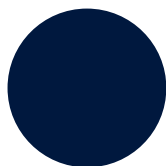

Nachtblau

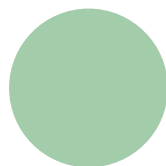

Mint

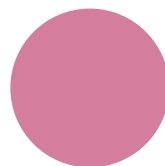

Rosa*

¹ Komplexe physikalische Entstauungstherapie * nur obere Extremitäten

Vorteile im Überblick, z. B. Lymphatrex Jacke:

- Halsausschnitt glatt eingefasst
- Raglanärmel verhindert Einschnürungen und sorgt für hohe Bewegungsfreiheit
- Anatomisch gestrickte Cups ohne zusätzliche Naht
- Distal poröser Armabschluss
- Unterbruststreifen für hohe Passform und bessere Symmetrie

Optional:

- In das Cup eingearbeitete Prothesentasche(n)
- Kombinierte Narben- und Ödemtherapie durch eingenähtes Silon-TEX® im Cup
- Verschluss wahlweise mit Haken/Ösen oder Reißverschluss
- Befestigung am Abschluss durch Haftband, Haftbandstücke, Taillenband oder Schrittgurt

Kompressionsklassen



KKL 1



KKL 2



KKL 3



Lymphatrex Produktvarianten

Lymphatrex Fine, jetzt Lymphatrex Support
Lymphatrex Poly, demnächst Lymphatrex Control
Lymphatrex Poly Strong, demnächst Lymphatrex Lead



Hose (AT)

Support (KKL 1):
17.06.17.0022
Poly (KKL 2):
17.06.17.1022
Poly Strong (KKL2): (KKL3)
17.06.17.1026 17.06.17.2022



Einbeinhose (ATE)

Support (KKL 1):
17.06.17.0022
Poly (KKL 2):
17.06.17.1022
Poly Strong (KKL2): (KKL3)
17.06.17.2026 17.06.17.2022



Leggings (BT)

Support (KKL 1):
17.06.21.0021
Poly (KKL 2):
17.06.21.1022
Poly Strong (KKL 2): (KKL3)
17.06.21.1007 17.06.21.2019



Caprihose (CT)

Support (KKL 1):
17.06.18.0021
Poly (KKL 2):
17.06.18.1017
Poly Strong (KKL 2) (KKL 3)
17.06.18.2021 17.06.18.2019



Bermudahose (ET)

Support (KKL 1):
17.06.19.0021
Poly (KKL 2):
17.06.19.1028
Poly Strong (KKL 2) (KKL 3)
17.06.19.1026 17.06.19.2024



Radlerhose (FT)

Support (KKL 1):
17.06.22.0020
Poly (KKL 2):
17.06.22.1015
Poly Strong (KKL 2) (KKL 3)
17.06.22.1023 17.06.22.2016



Wadenstrumpf (AD)

Support (KKL 1):
17.06.14.0023
Poly (KKL 2):
17.06.14.1023
Poly Strong (KKL2): (KKL 3)
17.06.14.1027 17.06.14.2025




Halbschenkelstrumpf (AF)

Support (KKL 1):
17.06.15.0019
Poly (KKL 2):
17.06.15.1021
Poly Strong (KKL 2): (KKL 3)
17.06.15.1025 17.06.15.2023



Oberschenkelstrumpf (AG)

Support (KKL 1):
17.06.16.0023
Poly (KKL 2):
17.06.16.1023
Poly Strong (KKL 2): (KKL 3)
17.06.16.1027 17.06.16.2025

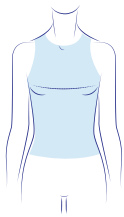

Weste/Jacke:

Weste

Support (KKL 1): 17.11.02.0001

Poly (KKL 2): 17.11.02.0001

Jacke

Support (KKL 1): 17.11.02.0001

Poly (KKL 2): 17.11.02.0001



Handschuh ohne Finger mit Daumenansatz (AC) (AD) (AE)

Support (KKL 1):

17.10.07.0013

Poly (KKL 2):

17.10.07.1007



Handschuh ohne Finger mit Daumenansatz Ellenbogen-übergreifend (AF) (AG)

Support (KKL 1):

17.10.06.0021

Poly (KKL 2):

17.10.06.1016



Handschuh mit Finger offen oder geschlossen (AC) (AD) (AE)

Support (KKL 1):

17.10.08.0023

Poly (KKL 2):

17.10.07.1006




Handschuh mit Finger offen oder geschlossen Ellenbogen-übergreifend (AF) (AG)

Support (KKL 1):

17.10.06.0020

Poly (KKL 2):

17.10.06.1013

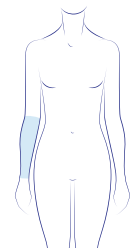


Armbandage (CD) (CE)

Support (KKL 1):

17.10.05.0021

Poly (KKL 2):

17.10.05.1010

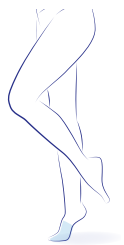


Zehenkappe (AA)

Support (KKL 1) 17.99.99.2004

Poly (KKL 2) 17.99.99.2004

Poly Strong (KKL 2) 17.99.99.2004

Poly Strong (KKL 3) 17.99.99.2004

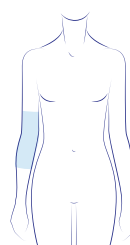

Armbandage Ellenbogen-übergreifend (CF) (CG)

Poly (KKL 1):

17.10.04.0047

Poly Strong (KKL 2):

17.10.04.1031

Eine detaillierte Übersicht aller Optionen und Modelle finden Sie in unserer Preisliste.

Komplexe physikalische Entstauungstherapie (KPE)

Behandlung des Lymphödems

KPE 1: Entstauung

Kompression
Bandagierung

Mobiderm® Kits
Platten und Binden

Manuelle
Lymphdrainage

Selbstmanagement als Basis

Die komplexe physikalische Entstauungstherapie (KPE) wird in zwei Phasen unterteilt:

Phase 1 (KPE 1): Die tägliche **manuelle Lymphdrainage (MLD)** über zwei bis drei Wochen aktiviert den Lymphfluss in den noch funktionierenden Lymphgefäßen und hilft auf diese Weise bei der Entstauung. In leichteren Fällen kann diese Behandlung ambulant geschehen; bei schwererer Erkrankung ist ein Aufenthalt in einer lymphologischen Klinik empfehlenswert. Im Anschluss an die manuelle Lymphdrainage wird mit einer **Kompressionstherapie** das Ergebnis unterstützt: Der kontinuierliche Druck von außen ermöglicht den Rückfluss der Lymphflüssigkeit und ihrer Bestandteile in die Lymphgefäße und Venen. Am Ende dieser Phase wird Maß für ein Kompressionskleidungsstück wie Strumpf, Armstrumpf oder Jacke genommen, um die KPE2 vorzubereiten.

KPE 2: Erhaltung

Kompression



Lymphatrex
Flachstrickversorgung



Ruhe- und Nachtversorgung
mit **Mobiderm**®

Bewegungs-
therapie

Hautpflege



für eine erfolgreiche Therapie

Phase 2 (KPE 2): In dieser Phase geht es um die **Stabilisierung des erreichten Zustandes und den Übergang aus der Entstauungsphase**. Die manuelle Lymphdrainage wird weniger häufig ausgeführt und anstelle der Bandagierung aus Phase 1 **übt tagsüber die maßgefertigte Kompressionskleidung den nötigen Druck aus**. Zur Erhaltung der Ergebnisse haben sich **auch in Ruhephasen oder während der Nacht spezielle Kompressionsprodukte** bewährt.

KPE 1 Entstauungsphase Der Allrounder

Mobiderm® ist ein Medizinprodukt aus Schaumstoffwürfeln, das von Vliesbandagen umhüllt ist. Es gibt unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von **Mobiderm®**: Das Produkt wird entweder als Binde oder Platte unter der Kompressionsbandagierung eingesetzt oder direkt in die mobilisierende Kompressionsbekleidung eingearbeitet. Durch den Druckunterschied zwischen der würfelstrukturartigen Auflagefläche und der angrenzenden Umgebung wird der Lymphabfluss durch einen Mikromassageeffekt verbessert und die Wirksamkeit der Lymphdrainage verstärkt.

Mobiderm® Binden kommen unter einer Kompressionsbandagierung zur Anwendung. Sie erzeugen einen Druckunterschied zwischen der Auflagefläche der eingearbeiteten Würfelstruktur und der angrenzenden Umgebung, wodurch das Unterhautgewebe mobilisiert wird. Hierdurch wird das Ergebnis der manuellen Lymphdrainage nicht nur gehalten, sondern verstärkt. Die verwendeten Materialien ermöglichen größtmögliche Beweglichkeit während der Bandagierung und tragen so zu einem optimalen Therapieerfolg bei hoher Patientencompliance bei.



Mobiderm® Kits – die erprobten Komplettlösungen:

Zur Mobilisierung des Unterhautgewebes mit gleichzeitig größtmöglicher Mobilität in der Entstauungsphase


Mobiderm® Kit 1 Arm

1 x Biflex 16 Binde 8 cm x 3 m
1 x Biflex 16 Binde 8 cm x 5 m
1 x Cotton Short Stretch Binde 11 cm x 4 m
2 x Mobiderm® Binde 10 cm x 3 m
Art.-Nr. 37009029999905
PZN07034858

Mobiderm® Kit 2 Bein

1 x Biflex 16 Binde 8 cm x 3 m
1 x Biflex 16 Binde 10 cm x 3 m
1 x Biflex 16 Binde 10 cm x 5 m
2 x Cotton Short Stretch Binde 11 cm x 4 m
3 x Mobiderm® Binde 10 cm x 3 m
Art.-Nr. 37009029999906
PZN 07034901

Wirkprinzip Mobiderm®

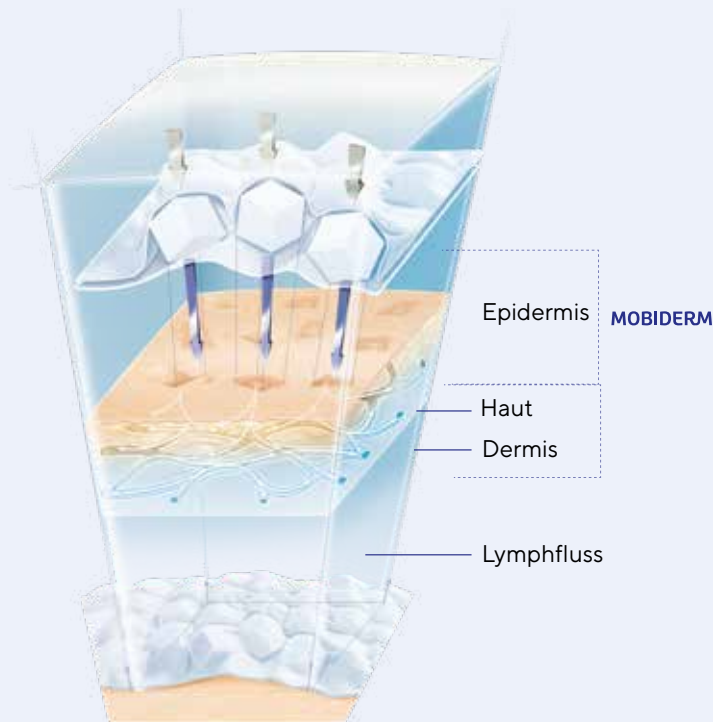

Effektiv

- Schnelle Reduzierung des Ödemvolumens
- Lockerung von fibrotischer, sklerotischer oder ödematöser Haut

Praktisch

- Leicht, komfortabel und flexibel, der Patient behält seine Bewegungsfreiheit und die Lymphdrainage wird angeregt.

Komfortabel

- Weiche Hautauflage
- Anschmiegsam für verbesserten, anatomisch korrekten Sitz



Biflex 16

- Latexfreie Langzugbinde mit Markierungen für einen korrekten Druckaufbau



Cotton Short Stretch

- Doppellagige Baumwollbinde



Platten

- Zuschneidbares Pelottenmaterial, 2 Würfelgrößen
- Zur lokalen Mobilisierung in der Ödemtherapie



Binden

- Patentierte Bandagen für effiziente und angenehme Entstauung durch Mobilisierung des Unterhautgewebes

KPE 2 Erhaltungsphase Ruhe- und Nachtversorgung

Mit **Mobiderm® autofit** stabilisieren Patienten die Ergebnisse der KPE – und das auch in Ruhephasen und über Nacht. Denn auch in der Erhaltungsphase ist es entscheidend, der betroffenen Extremität bzw. Körperregion kontinuierliche Ruhephasen in Form von sanfter Entstauung zu gönnen. Regelmäßig angewendet, verhindert **Mobiderm® autofit** den gefürchteten Rebound-Effekt: die Verschlimmerung der Symptome nach der Entstauung. Die Tagversorgung mit Kompressionsprodukten von Thuasne wird optimal ergänzt.


Effektiv: gute Stabilisierung des Volumens der entstauten Extremität – Lockerung von fibrotischer, sklerotischer oder ödematöser Haut und Gewebe durch den Mikromassage-Effekt.

Praktisch: Leicht, komfortabel und flexibel, der Patient behält seine Bewegungsfreiheit und somit wird die Lymphdrainage angeregt.

Komfortabel: Weiche Hautauflage – anschmiegsam für verbesserten, anatomisch korrekten Sitz. 82% der Patienten, die bereits Kompressionskleidung tragen, bevorzugen laut der MARILYN-Studie¹

Mobiderm® autofit.

Mobiderm® autofit – die komfortable Lösung bei Lymphödemen: leicht anzulegen, bequem zu tragen, ohne aufwendiges Wickeln.

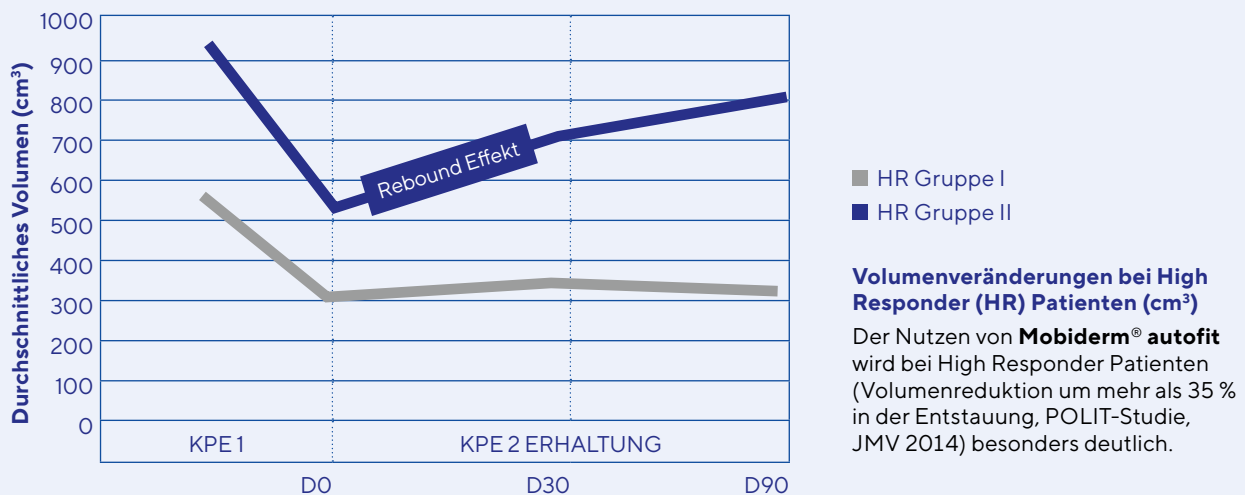

¹ Quelle: S. Mestre^{1,2} & C. Calais¹ & G. Gaillard¹ & M. Nou¹ & M. Pasqualini³ & C. Ben Amor³ & I. Quere^{1,2,4}
Supportive Care in Cancer - DOI 10.1007/s00520-017-3652-5



Mikro Massage Mobilisation

Schnell und einfach in der Anwendung

Armstrumpf



Variabel einstellbare Klettverschlüsse mit markierten Befestigungszonen

zur leichten Reproduktion der Einstellung und visuellen
Kontrolle von Veränderungen im Ödemvolumen



Halboffene Konstruktionen einfach zum An- und Ausziehen



Zu öffnendes Handteil bequeme Alltagsanwendung

Waden- oder Oberschenkelstrumpf

Eine detaillierte Übersicht zu Größen & PZN-Nummern finden Sie in unserer Preisliste.



Variabel einstellbare Klettverschlüsse mit markierten Befestigungszonen

zur leichten Reproduktion der Einstellung und visuellen Kontrolle von Veränderungen im Ödemvolumen



Halboffene Konstruktionen einfach zum An- und Ausziehen



Rutschfeste Sohle bequeme Alltagsanwendung



Auch erhältlich als
Mobiderm® Handschuh
mit oder ohne Finger




Mobiderm® Intimate-Programm

Eine Rundumversorgung für alle Körperbereiche

Die meisten chronischen Ödeme (einschließlich Lymphödeme) betreffen die oberen oder unteren Gliedmaßen.

Aber auch andere Körperregionen können betroffen sein, wie etwa der Thorax-, Brust- und der Genitalbereich.

Mit den neuen „Mobiderm® Intimate“-Produkten bietet Thuasne® neue Versorgungsmöglichkeiten für Mamma- und Thoraxwand- sowie für Genitalödeme an.

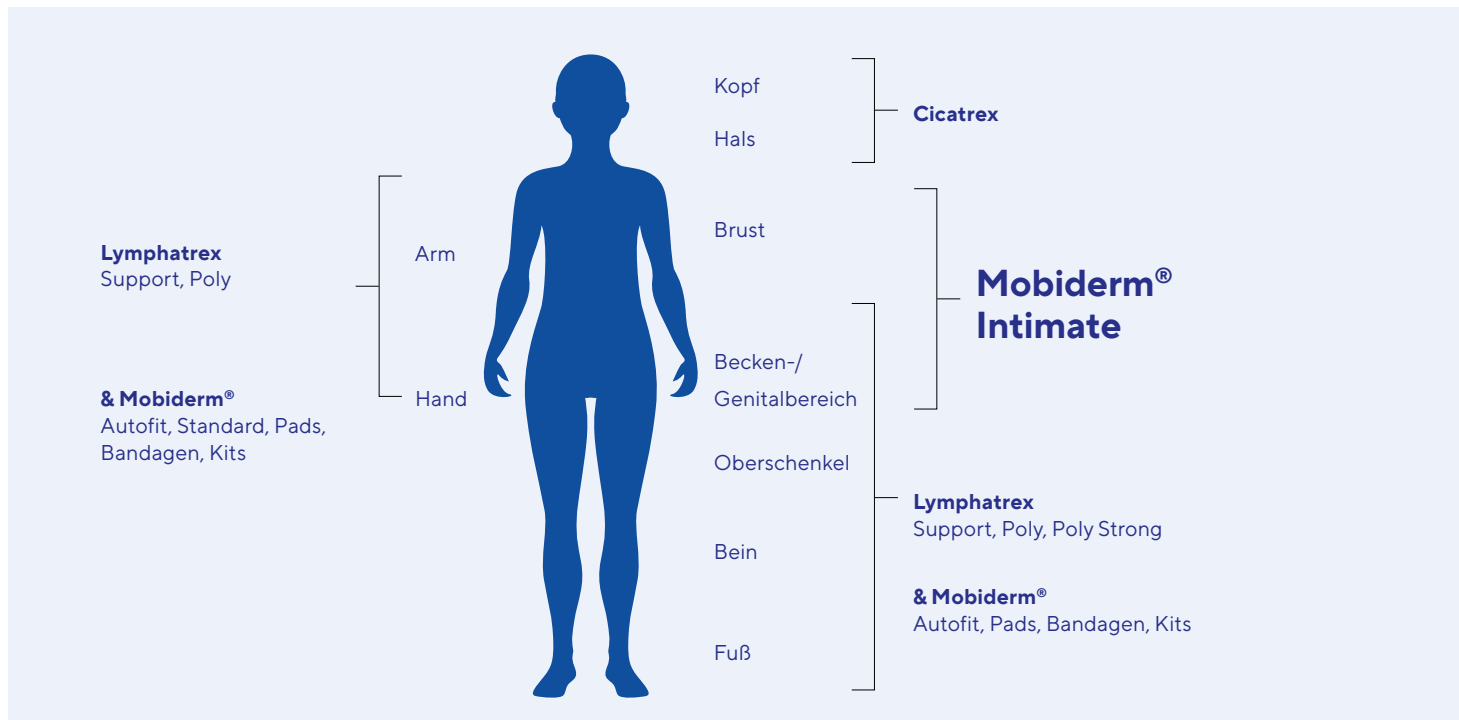

BH

- Komprimierender und mobilisierender BH
- Brust- und Thoraxwandödem
- Größe: XS – XL
- Brustumfang: 70 – 115
- Cupgrößen: AA/A, B/C, D/E



Shorts

- Kompressions- und MobilisierungssHORTS für Frauen und Männer
- Genital- und Beckenödem
- Größe: 1 – 6



Mobiderm® Intimate BH

Unser Kompressions-Lymph-BH **Mobiderm® Intimate-BH** bietet eine optimale Versorgung für Frauen, die unter Brust- und Brustwandödemen leiden. Der BH ist speziell für die Bedürfnisse von Frauen nach einer Brustkrebsoperation konzipiert. Nach plastischen Brustoperationen wirkt er formstabilisierend und entlastend und unterstützt bei der Kompression und Drainage von Ödemen, die nach einer Brustkrebsbehandlung entstehen können.

Dank seines integrierten Kompressionspolsters übt der **Mobiderm® Intimate-BH** einen erhöhten Druck auf die von Ödemen betroffenen Gewebereiche aus. Die Lymphdrainage wird dadurch deutlich verbessert. Außerdem wird durch die kontrollierte Kompression im Bereich des Narbengewebes die Entstehung von Hämatomen minimiert.

Ausstattung

- Integrierte Taschen für die Brustprothesen
- Integrierte und abnehmbare Mobiderm®-Pads, sofort einsatzbereit
- Breite gepolsterte Träger, **Vorderverschluss**
- Aus weichem, aber komprimierendem Material, **leicht anzuziehen**
- Farbe nude, **nicht sichtbar** unter der Kleidung
- Mobiderm® **Pads auch separat erhältlich**



Mobiderm® Intimate Shorts

Mobiderm® Intimate Shorts sind spezielle Hilfsmittel für Männer und Frauen, die an einem Ödem im Becken- und/oder Genitalbereich leiden.

Das Produkt besteht aus einer Kompressionshose und einem Genital-Mobilisierungspad auf Basis unserer Mobiderm®-Technologie. Die darin enthaltenen Schaumstoffwürfel ermöglichen eine optimale Anpassung an die spezifische Position des Lymphödems.


- **Leichtes An- und Ausziehen** dank elastischer Stoffe
- Eine Komplettlösung mit Kompressionshose + Genital-mobilisierungspad: **Alles in einem Produkt**
- Flache Nähte zur **Vermeidung von Hautreaktionen**
- Integrierte Tasche in der Hose für das Pad
- **Pflegeleicht**: maschinenwaschbar bei 40°
- Kann den ganzen **Tag und** die ganze **Nacht** getragen werden
- Kompatibel mit Kompressionsstrümpfen

Narbentherapie


Cicatrex steht für eine über 30 Jahre reichende Erfahrung in der Herstellung von Kompressionsbekleidung für die Narbenbehandlung – **made in Germany**. Viele der heute etablierten Versorgungsvarianten sind das Ergebnis unserer kontinuierlichen Entwicklungsarbeit im intensiven Austausch mit Anwendern, Patienten und Fachleuten aus Klinik und Forschung.

Mit unserer hochwertigen Kompressionskleidung setzen wir Maßstäbe im Bereich der Narbentherapie. Durch die Verwendung modernster Materialien und die umfassende Versorgung nach Maß erzielen wir sichtbare Erfolge: Von der Erstversorgung bis zur vollständigen Narbenreife bieten wir die passende Kompression, um Wucherungen, Keloiden und Narbenkontrakturen wirksam vorzubeugen.

Wirkschema:

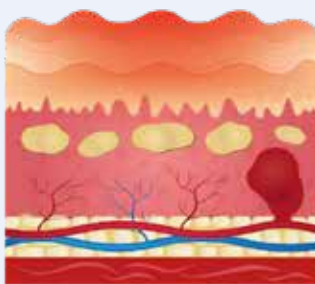

Hypertrophe Narbe
vor der Therapie

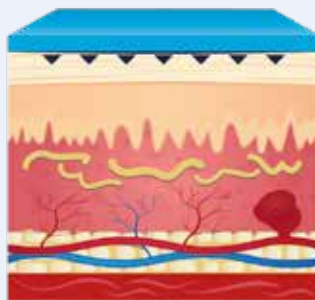

Kompressionswirkung
während der Therapie



Flach verheilte Narbe
nach der Therapie

Mit kontinuierlich flächigem Druck ersetzt **Cicatrex** die Rückstellkraft und Oberflächenspannung der Haut. Die Oberflächenspannung bildet die natürliche Grenze für die Narbenbildung, um eine Erhebung über Hautniveau zu verhindern. Die Durchblutung der Narbe wird reduziert, die Kollagenfasern ordnen sich parallel an. **Cicatrex** ist hypoallergen, beugt Entzündungen im Gewebe vor, lindert den Juckreiz und bietet der frischen Narbe umfassenden Schutz.




Passgenauer Tragekomfort für den Therapieerfolg

Unsere **Cicatrex**-Produkte sind besonders angenehm in der Anwendung, was die Patienten-Compliance und damit den Heilungserfolg zusätzlich fördert. Wir garantieren eine uneingeschränkte Beweglichkeit bei konstantem Druck in Ruhe und Belastung. Das von uns verwendete **Langzugmaterial** überzeugt durch eine ideale Oberflächenkompression und hohe Dehnbarkeit, wodurch unsere Produkte auch bei Umfangveränderungen wirksam bleiben.


Darüber hinaus kann der Tragekomfort durch weitere Optionen erhöht werden, etwa durch einen Streckdefizit-Ausgleich und kompressionsfreies Material, das für einen passgenauen Sitz sorgt. Mit unseren Pelotten, Kompressionsnähten, Zehen- und Fingerspreizern bieten wir zusätzlich individuelle Lösungen für schwer erreichbare Körperstellen.

Für unsere Kompressionskleidung **Cicatrex** verwenden wir ausschließlich **durchgefärbte Garne**, die formstabil und farbbeständig sind. Bei empfindlicher und infektionsgefährdeter Haut bieten wir zudem ein silberhaltiges Material an, das in vielen Farben erhältlich ist.


Farbe

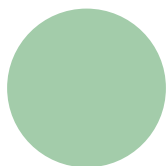


Mint¹

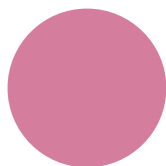


Rosa

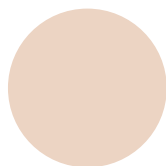


Beige

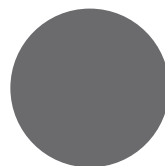


Anthrazit²

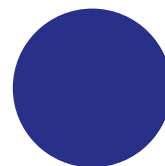

Nachtblau²

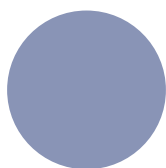


Jeans

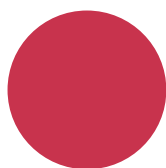

Rot⁴



Trend⁵

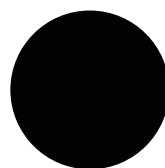

Schwarz

¹nicht in Skin erhältlich ²nur in Rigid und Nature ³solange der Vorrat reicht ⁴nicht in Gewebe erhältlich ⁵nur in Skin erhältlich



Cicatrex Maßversorgung

HALSROLLE



- zur Versorgung von Narben am Hals

HANDSCHUH



Handschuh mit/ohne Finger Finger offen/geschlossen

- mit individueller Stulpenlänge
- kombinierbar mit Armstrumpf
- Erhöhung des Drucks in den Zwischenfingerfalten durch Kompressionsnähte möglich

JACKE



- Raglanärmel optimieren die flächige Druckverteilung und verhindern Einschnürungen
- Unterbruststreifen bei Brustkörbchen für eine verbesserte Passform
- Achselstücke und Brustkörbchen bei Nature gewebt und bei Skin wahlweise auch ohne Kompression
- Brustprothesen-Tasche im Cup möglich
- optional sorgt ein Schrittgurt für sicheren Halt
- in verschiedenen Armlängen
- mit einem Verschluss auf Brust/Rücken

WESTE



- zur Kompression unterhalb der Unterbrust
- mit einem Verschluss auf Brust/Rücken
- Brustkörbchen bei Nature gewebt und bei Skin wahlweise auch ohne Kompression
- Prothesen-Tasche im Cup möglich
- optional sorgt ein Schrittgurt für sicheren Halt

HOSE MIT LEIBTEIL- VERLÄNGERUNG



- anatomisch korrekter Druck bis über die Taille hinaus
- offene/geschlossene Fußspitze

HOSE



- anatomische Anformung
- offener/geschlossener Schritt
- in verschiedenen Beinlängen
- auch mit Fuß möglich
- optional mit Leibteilverlängerung
- diagonale Zügelung (Bauchdeckenverstärkung) möglich
- vielfältige Befestigungsoptionen

STRUMPF



- in verschiedenen Längen
- mit offener oder geschlossener Spitze
- bis AD mit offenen oder geschlossenen Zehen möglich, optional Kompressionsnähte oder Zehenspreizer
- vielfältige Befestigungsmöglichkeiten


ZEHENKAPPE



- Zehenspreizer möglich
- je Zeh Silon-Tex und Kunstleder-Besatz möglich
- mit offener oder geschlossener Spitze
- verschiedene Zehenvarianten möglich

Eine detaillierte
Übersicht aller Optionen
und Modelle finden Sie
in unserer Preisliste.

Cicatrex Qualitäten & Optionen

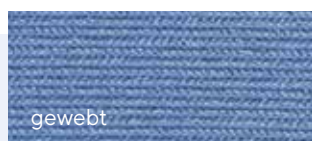

gewebt



gestrickt

Cicatrex Nature, der Allrounder: für nahezu jeden Anspruch. Es zeichnet sich durch einen hohen Viskoseanteil aus. Viskose wird aus natürlichen Rohstoffen gewonnen. Die Natürlichkeit setzt sich im Kleidungsstück fort: Es ist hautfreundlich und atmungsaktiv. Die hohe Elastizität erleichtert das An- und Ausziehen der Kleidung.

Cicatrex Nature gewebt ist das ideale Material für die klinische Erstversorgung. **Cicatrex Nature gestrickt** bietet flache Nähte und anatomisch geformte Strick-Einkehren, was den Tragekomfort zusätzlich erhöht.



Cicatrex Rigid zeichnet sich durch eine glatte Oberfläche und hohe Strapazierfähigkeit aus. Dafür sorgt die Polyamid-Microfaser im Gestrück. Die glatte Oberflächenstruktur verhindert Pilling und der hohe Polyamidanteil lässt das Kleidungsstück sehr schnell trocknen und ermöglicht eine sehr hohe Atmungsaktivität. **Cicatrex Rigid** eignet sich durch seine hohe Strapazierfähigkeit besonders für Kleidungsstücke von körperlich aktiven Personen und Kindern. Erhältlich in verschiedenen Farben, für jedes Alter, je nach persönlicher Vorliebe.



Cicatrex Skin ist das feinste und dünnste Material, trägt kaum auf und wird gern unter Businesskleidung getragen. Zugleich wirkt es durch leichten Glanz elegant und ist zudem touchscreentauglich. Aufgrund der schnell trocknenden Qualität und des zusätzlichen Arbeitsdrucks, den das mittelzügige Gewebe mit sich bringt, ist dieses Material bei aktiven Patienten besonders beliebt. Das Material ist zuschneidbar.




Cicatrex Silver ist eine weitere Flackstrickqualität mit Viskose, das Material ist von einem silberbeschichteten Polyamidfaden durchzogen. Silber eliminiert Bakterien auf der Haut und schützt so vor Infektionen. Das ist besonders wichtig für Patienten mit empfindlicher Haut oder Infektionsproblematik. Weitere Anwendungsgebiete sind Neurodermitis, Wundheilungsstörungen und Phantomschmerz nach Amputationen. **Cicatrex Silver** lindert den Juckreiz und ist in verschiedenen Farben erhältlich.

BEZEICHNUNG FERTIGUNGSTECHNIK

ZUSAMMENSETZUNG

VERFÜGBARE FARBEN

Nature	gewebt	60% Viskose, 21% Polyester, 19% Elasthan	beige · schwarz · mint · jeans · rosa
	flachgestrickt	54% Viskose, 27% Polyester, 19% Elasthan	beige · schwarz · mint · jeans · rosa · rot anthrazit · nachtblau
Rigid	flachgestrickt	81% Polyamid, 19% Elasthan	beige · schwarz · mint · jeans · rosa · rot anthrazit · nachtblau
Skin	gewirkt	59% Polyamid, 41% Elasthan	beige · schwarz · jeans · rosa · rot · trend
Silver	flachgestrickt	46% Viskose, 27% Polyester, 19% Elasthan, 8% Polyamid silberbeschichtet	beige · schwarz · mint · jeans · rosa · rot

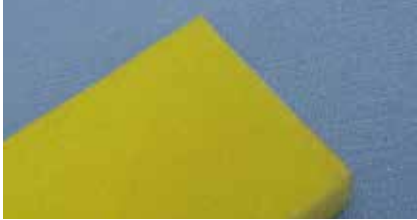

Memoryschaum

Diese Option wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und den Druck zu verteilen. Memoryschaum wird in die Kleidung eingenäht.



Druckpelotte

Für die individuell anpassbare Druckübertragung. Die Pelotten werden eingnäht oder lose beigelegt und können mit Silon-TEX® kombiniert werden.



Silon-TEX®

Ein besonderes Material auf Silikonbasis wird partiell in die Kleidung eingnäht. Silon-TEX® sorgt für ein feuchtes Milieu auf der Haut und hält die Narbe dadurch geschmeidig und weich. Es kann in bis zu zwei Drittel des Umfangs eingnäht werden.

Hohlhandpelotte aus Silikon



Finger- und Zehenspreizer

Im Bereich der Finger- bzw. Zehenzwischenräume erhöhen sie den Druck. Sie werden an den Handschuh bzw. an die Zehenbandage angepasst und in Kombination mit dem jeweiligen Kompressionsteil getragen.



Kunstlederbesatz

Zur Erhöhung der Griffkraft kann an den Greifflächen ein Kunstlederbesatz appliziert werden. An beanspruchten Körperstellen kann er außerdem vor Abrieb schützen.



Cicatrex Pad

Maßgefertigtes, wiederverwendbares Silikonpad. Dank textiler Rückseite gleitet es an der Kompressionskleidung vorbei und lässt sich, da nicht fest vernäht, präzise positionieren und flexibel auch in mehreren Kleidungsstücken verwenden. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.



Streckdefizit-Ausgleich

An Arm- und Kniebeugen kann bei **Cicatrex** Kompressionskleidung ein Streckdefizit-Ausgleich eingearbeitet werden. Er hilft übermäßigen Faltenwurf bei Bewegungseinschränkung zu vermeiden.



Verschlüsse

Sie werden nach Anforderungen des Patienten individuell und nach praktischen Gesichtspunkten positioniert. Als Verschlüsse werden Reißverschluss (ein- oder aufgenäht), Klettverschluss sowie Haken und Ösen angeboten.



Kompressionsfreies Material

Im Achsel- oder Brustbereich (**nur gewebt möglich**), aber auch zwischen Fingern oder Zehen (**gestrickt und gewebt möglich**) kann kompressionsfreies Material verwendet werden, wenn an diesen Körperstellen keine Kompression erforderlich ist. Es vermeidet Faltenwurf und erhöht den Tragekomfort.

Cicatrex Kinderversorgung

Farbenfreude Kindgerechte Kompression

Unsere hochwertige Kompressionsversorgung für Kinder wird noch bunter. Außerdem sind alle Materialqualitäten in der Maßanfertigung mit originellen Bügelbildern (Motivgröße ca. 5 x 4 cm) erhältlich. Sie zeigen die vier kleinen Freunde von „Cica Trex – Die Zauberin“ aus unserem gleichnamigen Bilderbuch.




Alle Maßanfertigungen können auf Wunsch mit bunten Nähten gefertigt werden!


BÜGELBILDER




Elja Ehrenwert

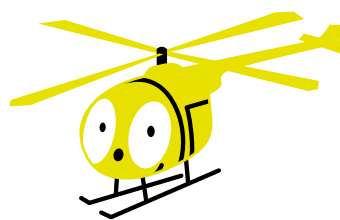

Hubertus Hui

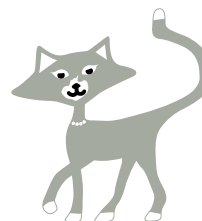

Gloria von Glanz

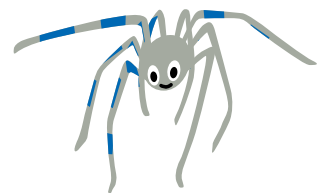

Spuk



Cicatex Interim (Serie)

Für die schnelle Versorgung Flächige Kompression im Bereich 20 bis 35 mmHg

Sollte eine sofortige Versorgung medizinisch notwendig sein, empfehlen wir unsere konfektionierte Kompressionskleidung. Diese empfehlen wir auch, sofern noch nicht feststeht, ob eine Maßversorgung erforderlich ist. Auch kurz nach Operationen ist das Angebot des Serienprogramms geeignet, da aufgrund von Schwellungen oftmals nicht exakt Maß genommen werden kann.

Bei nur kurzer Dauer einer Kompressionstherapie oder einfachen anatomischen Gegebenheiten sind die Kompressionsteile des Serienprogramms hervorragend geeignet.

Sie sind in derselben Qualität wie **Cicatrex Nature** gewebt gefertigt. Die Interimhandschuhe bestehen aus dem innovativen **Cicatrex Skin Material**.

KOMPRESSIONSTEIL



Art.-Nr. 3400 kurz
Art.-Nr. 3425 lang

- in 2 verschiedenen Längen für Arm Oberschenkel oder Wade
- Serienanfertigung in 8 Größen

KOPFBAND



Art.-Nr. 3411

- Kompression kann mittels Klettverschluss variiert werden
- Serienanfertigung in 2 Größen
- Farbe: weiß

KINNSCHLINGE



Art.-Nr. 3410

- Kompression kann mittels Klettverschluss variiert werden
- Serienanfertigung in 3 Größen
- Farbe: weiß

Eine detaillierte
Übersicht aller Optionen
und Modelle finden Sie
in unserer Preisliste.

WESTE



Art.-Nr. 3424

- mit Reißverschluss caudal
- Serienanfertigung in 6 Größen
- Farbe: weiß

INTERIMSHANDSCHUH



Art.-Nr. 3448-06 (kurz) Art.-Nr. 3448-05 (lang)

- mit geschlossenen Fingern
- Stulpenlänge: 5 oder 15 cm
- schnittfestes Gestrick
- individuelle Anpassung der Finger-/Stulpenlänge durch Zuschnitt
- Serienanfertigung in 8 Größen
- Farben: karamell und schwarz

HOSE



Art.-Nr. 3403 (Panty kurz) Art.-Nr. 3412 (Panty lang) Art.-Nr. 3420 (Hose lang)

- mit offenem Schritt
- in 3 verschiedenen Längen
- Serienanfertigung in 6 Größen
- Farbe: schwarz

HÜFTHOSE

Neu



Art.-Nr. 3458

- Postoperativ nach prothetischem Ersatz des Hüftgelenks zur Kompression des operierten Bereiches.
- mit integrierter Druckpelotte
- beidseitig tragbar
- Serienanfertigung in 3 Größen
- Farbe: schwarz

MIEDERHOSE



Art.-Nr. 3415

- Klettverschluss im Schritt
- diagonale Bauchdeckenverstärkung
- Kompressionsklasse 2
- Serienanfertigung in 6 Größen
- Farbe: weiß

Cicatrex Contour

Cicatrex Contour Kompressionstextilien aus der Narbentherapie dienen zur Verbesserung und Stabilisierung von Operations-ergebnissen nach plastisch-ästhetischen Eingriffen oder bei medizinischen Behandlungen von Lymph- und Lipödemen.

Cicatrex Contour vereint stilvolles Design¹ mit durchdachten Details für ein sanftes und angenehmes Tragegefühl². Die hohe Elastizität des Materials sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und erleichtert das An- und Ausziehen der Kompressionskleidung.

Cicatrex Contour Kompressionstextilien sind zur Versorgung der unteren Extremität verfügbar als:

- Leggings mit niedriger Taille
- Leggings mit hoher Taille
- Hose Slipform mit hoher Taille


und zur Versorgung der oberen Extremität als:

- Jacke für Damen
- Weste für Herren.

Indikationen

Schädigung der Haut und der Heilungsfunktion der Haut mit hypertropher Narbenbildung oder Keloidbildung:

- nach Verletzungen/Verbrennungen/chirurgischen Eingriffen
- Hauttransplantationen
- zur Verbesserung der Narben-/Wundheilung bis zur vollständigen Abheilung der Narbe
- zur Stabilisierung von Operations-ergebnissen
- medizinische Versorgung von akuten und chronischen Lymphödemen
- Lipödem-Schmerzen

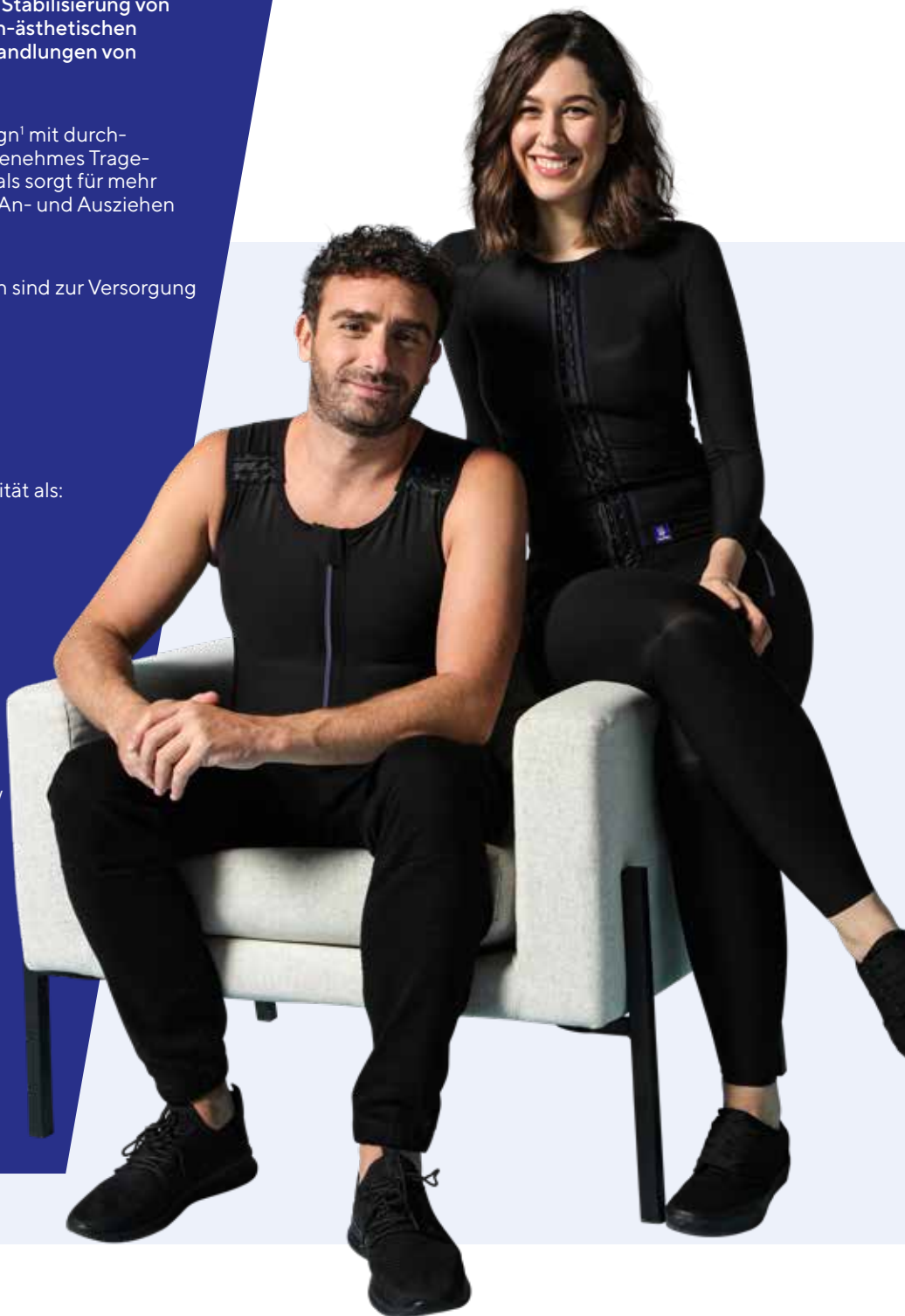

(1) CER - 2021.04.08 CER Cicatrex and Cicatrex contour Kompressionskleidung

(2) Ergebnisse der Anwendungsbeobachtung

KOMPRESSIONSTEXTILIEN FÜR DIE POSTOPERATIVE VERSORGUNG


Cicatrex Contour Kompressionstextilien unterstützen den postoperativen Ausgleich von Unregelmäßigkeiten an der Hautoberfläche. Das hochwertige Material, äquivalent zur Kompressionsklasse 2, kann die Formgebung optimieren, Kontur-unregelmäßigkeiten weitgehend verhindern und die Narbenheilung verbessern.

Die Cicatex Contour Leggings und Hose in Slipform mit hoher Taille überzeugen durch folgende Eigenschaften und Vorteile:

- Premium Kompressionsmaterial für einen flächigen Druck, äquivalent zur Kompressionsklasse 2 (entspricht den medizinischen Standards)
- Höherer Kompressionsdruck im distalen Bereich zur Vermeidung von Flüssigkeitsverlagerungen
- Offener Schritt*: Die Hygieneöffnung ermöglicht ein uneingeschränktes und angenehmes Tragegefühl

CICATREX CONTOUR KLEIDUNGSTEXTILIEN BESTEHEN AUS ELASTISCHEM STRETCHMATERIAL.

Die Produkte des Cicatrex contour Sortiments bestehen aus 59 % Polyamid und 41 % Elasthan. Die hohe Elastizität in Längs- und Querrichtung ermöglicht ein leichteres An- und Ausziehen der Kleidung und bietet eine gute Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umfänge.

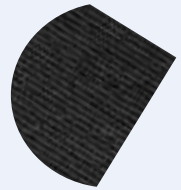

VORTEILE DES GEWIRKTEN CICATREX CONTOUR MATERIALS:

- Schnittfest und laufmaschenfrei: Hosenbeine können mit einer handelsüblichen Schere gekürzt werden, ohne auszufransen (Tipp: Nahtenden anschließend mit einem Riegel sichern.).
- Formstabil: Behält seine Form, auch bei besonders dünnem Material.
- Knitterfrei: Keine Faltenbildung, für eine dauerhaft glatte Optik.



Cicatrex Contour

VORTEILE FÜR PATIENTEN:

- Kompressionsversorgung mit umfassendem Schutz für die Narbe
- Hypoallergener Stoff beugt Entzündungen im Gewebe vor und lindert den Juckreiz
- Weicher, elastischer Bund am Saum
- Glatter Stoff für ein angenehmes Tragegefühl
- Modisch neutrales Design in eleganten Schwarz-Tönen mit flachen Nähten und verdeckten Reißverschlüssen, kombinierbar mit alltäglicher Kleidung

Cicatrex Contour

JACKE



Die Jacke (Versorgung für Frauen) vereint ästhetisches Design mit hohem Tragekomfort:

- Gemoldete Cups (nahtlos)
- Vordere Haken- und Ösenverschlüsse
- Schnittfestes Gewebe, Ärmel können gekürzt werden
- Keine Naht im axillären Bereich
- Verfügbare Größen: XS - XXXL

HMV-Nr. 17.11.01.0006



3-fache Weitenverstellung der Haken- und Ösenverschlüsse

WESTE



Die Weste (Versorgung für Männer) vereint ästhetisches Design mit hohem Tragekomfort:

- Reißverschluss mit Haken und Ösen an der Unterseite für ein einfacheres An- und Ausziehen
- Verdeckte Reißverschlusskanten
- Weiche Haken/Ösen
- Verfügbare Größen: XS - XXL

HMV-Nr. 17.11.01.0007



3-fach verstellbare Schulterlänge

Eine detaillierte Übersicht zu Größen & Maßpunkten finden Sie in unserer Preisliste.

LEGGINGS



Leggings mit niedriger oder hoher Taille*:

- Entscheidung für eine niedrige oder hohe Taille ist abhängig von der Operationshöhe (Oberschenkel, Unterleib etc.)
- Verfügbare Größen: XS – XXXXL

HMV-Nr. 17.06.06.0010 – mit niedriger Taille
 HMV-Nr. 17.06.06.0008 – mit hoher Taille

HOSE SLIPFORM MIT HOHER TAILLE



Hose Slipform mit hoher Taille*:

- Hohe Taillenform mit einem breiten elastischen Bund für einen sicheren Halt
- 3-fach verstellbarer Haken- und Ösen-Verschluss im Schrittbereich
- Verfügbare Größen: XS – XXXXL

HMV-Nr. 17.06.06.0009



Separate Einlage für den offenen Schritt zur Abpolsterung empfindlicher Hautstellen



Von innen gepolsterter Reißverschluss für ein sanftes Tragegefühl auf der Haut



Beidseitige Reißverschlüsse mit Haken und Ösen erleichtern das An- und Ausziehen



Einseitiger Reißverschluss auf der rechten Seite mit Haken und Ösen erleichtert das An- und Ausziehen

* Ab Herbst 2025 auch mit geschlossenem Schritt lieferbar

Neu

Silima® und Breastcare-Produkte

In Deutschland erkranken jährlich mehr als 70.000 Frauen an Brustkrebs. Als häufigste Folgeerkrankung entwickeln ca. 30% davon in Folge von Bestrahlung oder Entfernung von Lymphknoten ein Lymphödem in Arm, Brust oder Thorax.

In der postoperativen Phase nach Mamma ablatio, BET oder der Brustrekonstruktion kommt es darauf an, Ödemen vorzubeugen bzw. das Operationsergebnis und die Narbenheilung mit gezielter Kompression zu unterstützen.

Thuasne® vereint traditionell das Know-how aus Kompressionstherapie und Breastcare zu einem interdisziplinären Gesamtkonzept für die brustoperierte Frau.

SILIMA® *CARE*
for you



Quelle: <https://lymphfantastic.com> [Online] Zitat vom 21.09.2018
<https://lymphfantastic.com/2016/02/28/lymphoedem-die-krankheit-nach-dem-krebs-spiegel-online>. Vaezipour, Negar. Dissertation: Insidenz und Risikofaktoren des sekundären Lymphödems nach Therapie des Mammakarzinoms. Freiburg: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, 2015 S. 50-55

FÜR DIE ERSTE ZEIT DANACH: SICHERUNG, THERAPIE & PRÄVENTION



Cicatrex Jacke

- Prothesen-Tasche im Cup möglich



Cara-BH

- Kompressions-BH nach plastischer Brust-OP oder brusterhaltender Operation (BET)
- Bei Bedarf auch mit **Post-OP-Belt**

WIEDER IN BALANCE KOMMEN: SILHOUETTE & LEBEN

Silima® Brustprothesen

- Spezial BHs und Bademode



Silima® Ultra Light

Leichter
-60%



SELBSTMANAGEMENT & ÖDEM: PRÄVENTION UND REAKTION



Tagsüber unterstützt

Lymphatrex

(KPE 2) oder
Mobiderm® (KPE 1)
die komplexe
Entstauungstherapie.



In Ruhepausen
oder nachts sorgt

Mobiderm® autofit

dafür, dass die
Ergebnisse der KPE 2
erhalten bleiben.

Arion Anziehhilfen für Kompressionskleidung

Kompressionskleidung richtig anzuziehen, benötigt etwas Körperkraft und Beweglichkeit. Was aber tun, wenn beides eingeschränkt ist? Mit **Arion** Anziehhilfen lassen sich die Kompressionsprodukte einfacher und schneller anlegen. Die Anziehhilfen von **Arion** sind auch direkt bei Thuasne® erhältlich.

Produktvorteile :

- Verminderung der körperlichen Belastung für Pfleger und Patienten
- Verstärkte Selbstständigkeit und Therapietreue
- Einfache Anwendung
- Zeit- und Kostenersparnis
- Reibungsverringering durch sehr glattes Material mit Spezialbeschichtung
- **Erstattungsfähig mit separatem Rezept**
- Handwaschbar mit Feinwaschmittel bei 30°C



Arion Easy-Slide Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen mit offener Fußspitze



Arion Magnide® Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Fußspitze



Arion Easy-Slide Arm Anziehhilfe für Kompressionsarmstrümpfe




TSS-Handschuhe Sorgen für optimale Griffigkeit beim Anziehen, verhindern Beschädigungen des Strumpfes durch Fingernägel oder Schmuck



Arion Magnide® Kids Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Fußspitze für Kinder



Arion Easy-Slide Kids Spielend leichtes Anlegen der Kompressionskleidung von Kindern

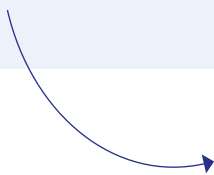

Ebenfalls erhältlich: Arion Dactyna.
Anziehhilfe für Kompressionshandschuhe mit offenen Fingerspitzen

Maßprodukte ganz einfach online bestellen

Gut wirkt, was getragen wird, weil es gut sitzt. Diese einfache Formel gilt ganz besonders für medizinische Kompressionsprodukte und macht die Genauigkeit bei einer individuellen Maßversorgung so wichtig.

Nutzen Sie für eine schnelle und papierlose Bestellung unser Online-Maßportal (<https://pro.thuasne.com/de-de>) oder die Thuasne M2M App. Der nutzergeführte Bestellprozess vereinfacht den Ablauf und Plausibilitätsprüfungen bieten zusätzliche Sicherheit.

THUASNE® M2M - APP

DER MOBILE PARTNER FÜR DIE PASSGENAUE VERSORGUNG

Nutzergeführte Bestellung für **Cicatrex**, **Lymphatrex** und **Venoflex** Maßversorgungen.

Die kostenlose App ist im App Store oder bei Google Play erhältlich.



Weitere Produktinformationen finden Sie in unserer Preisliste...



MASSPORTAL

<https://pro.thuasne.com/de-de>

Kundenservice Maßprodukte

Tel.: +49 6451 7212-180
Fax: +49 6451 7212-980 oder
E-mail: massbestellung@thuasne.de



Gern berät Sie unser Innendienst telefonisch bei allen Anliegen zur Konzeption der Versorgung, der Materialauswahl und beim Maßnehmen.

VENOFLEX
 Fax-Nr.: +49(0)6451 7212-980
 massbestellung@thuasne.de

☐ Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

Patientin
 Name: _____ m w
 Vorname: _____
 Geb.-Datum: _____
 Straße, Nr.: _____
 PLZ, Ort: _____
 Maßnr.-Nachversorgung _____
 Bemerkungen _____

Firmenanschrift
 Ansprechpartnerin: _____
 Telefon: _____
 Datum: _____

Lieferanschrift

Umfangmaße

Rechts

CG _____
 CF _____
 CE _____
 CD _____

LYMPHATREX
 Fax-Nr.: +49(0)6451 7212-980
 massbestellung@thuasne.de

☐ Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

Patientin
 Name: _____ m w
 Vorname: _____
 Geb.-Datum: _____

Firmenanschrift
 Ansprechpartnerin: _____
 Telefon: _____
 Kd.-Nr.: _____ Datum: _____

Lieferanschrift

☐ Kostenvorschlag
☐ Kostenvorschlag detailliert
 An Fax/Email: _____

☐ Bestellung

☐ Neuversorgung
☐ Nachbestellung, Maßnr.: _____
☐ Änderungen beachten
☐ Lipödem ☐ Lymphödem
☐ Lip-Lymphödem

Material/Kompressionsklasse
☐ Support KKK 1 ☐ Poly KKK 2
☐ Poly Strong KKK 2 ☐ Poly Strong KKK 3

Farbe
☐ beige ☐ schwarz ☐ anthrazit ☐ zarten
☐ rot ☐ jeans ☐ nachtblau ☐ mint

Zehen
☐ offen ☐ geschlossen

CICATREX
 Fax-Nr.: +49(0)6451 7212-980
 massbestellung@thuasne.de

☐ Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

Patientin
 Name: _____ m w
 Vorname: _____
 Geb.-Datum: _____
 Straße, Nr.: _____
 PLZ, Ort: _____

Firmenanschrift
 Ansprechpartnerin: _____
 Telefon: _____
 Datum: _____

Lieferanschrift

☐ Kostenvorschlag an Fax/Email:
☐ Bestellung

Artikel
☐ Kopf-/Halsband
☐ Kinnchlinge (bitte alle mit Punkt gekennzeichneten Messpunkte angeben)
☐ Kopfbandage

Halsrolle
 Höhe ☐ 5 cm ☐ gerade ☐ Version
☐ 7 cm ☐ hinten niedriger
☐ 10 cm
 Halsumfang (kleinster Umfang) _____ cm

Material
☐ Nature gewebt ☐ Skin

Farbe
☐ beige ☐ schwarz ☐ mint
☐ rot ☐ jeans ☐ rosa
☐ trend1 ☐ (nur Skin)

Nähte bunt

Bügelbild:
☐ Eule ☐ Spinne
☐ Katze ☐ Hubschrauber

Besonderheiten (bitte Fotos beilegen und einzeichnen)
☐ Druckpelotte
☐ Memoryschaum

11 Kopfumfang horizontal
12 Kopfumfang vortibial
13 Kopfumfang oben
14 Kopfumfang unten / Genende
15 Nasenbein-Hinterhauptbein

16 Nasenbein - Halsumfang oben
17 Unterlippe - Kinnspitze
18 Halslänge vorn
19 Halslänge hinten
20 Gehörgang - Gehörgang unter dem Kinn

21 Ohr unten - Ohr unten über Oberlippe
22 Ohr oben - Ohr oben über Nasenwurzel
23 Ohrlänge rechts
24 Ohrlänge links
25 Augenabstand innen
26 Augenabstand außen

27 Nasenbreite
28 Nasenlänge seitlich messen
29 Nasenflügel - Nasenflügel über Nasenbein (bei Nasenabdeckung)
30 Nasenlänge (bei Nasenabdeckung)
31 Mundbreite
32 Kinnbreite

Ohr rechts
☐ frei
☐ bedeckt
☐ Abdeckung abnehmbar
☐ Haftpads rechts

Gesicht
☐ frei
☐ bedeckt
☐ Hinterkopfstege (für Kinnchlinge)
☐ Haftpads Mitte

Nase
☐ frei
☐ bedeckt

Ohr links
☐ frei
☐ bedeckt
☐ Abdeckung abnehmbar
☐ Haftpads links

Rechter Fuß

	Umfang x	Umfang z	Länge
1			
2			
3			
4			
5			

1 Fußlänge (außen messen)
2 Fußlänge (innen messen)
3 Fußlänge (außen messen)
4 Fußlänge (innen messen)
5 Fußlänge (außen messen)
6 Fußlänge (innen messen)
7 Fußlänge (außen messen)
8 Fußlänge (innen messen)
9 Fußlänge (außen messen)
10 Fußlänge (innen messen)
11 Fußlänge (außen messen)
12 Fußlänge (innen messen)
13 Fußlänge (außen messen)
14 Fußlänge (innen messen)
15 Fußlänge (außen messen)
16 Fußlänge (innen messen)
17 Fußlänge (außen messen)
18 Fußlänge (innen messen)
19 Fußlänge (außen messen)
20 Fußlänge (innen messen)
21 Fußlänge (außen messen)
22 Fußlänge (innen messen)
23 Fußlänge (außen messen)
24 Fußlänge (innen messen)
25 Fußlänge (außen messen)
26 Fußlänge (innen messen)
27 Fußlänge (außen messen)
28 Fußlänge (innen messen)
29 Fußlänge (außen messen)
30 Fußlänge (innen messen)
31 Fußlänge (außen messen)
32 Fußlänge (innen messen)
33 Fußlänge (außen messen)
34 Fußlänge (innen messen)
35 Fußlänge (außen messen)
36 Fußlänge (innen messen)
37 Fußlänge (außen messen)
38 Fußlänge (innen messen)
39 Fußlänge (außen messen)
40 Fußlänge (innen messen)
41 Fußlänge (außen messen)
42 Fußlänge (innen messen)
43 Fußlänge (außen messen)
44 Fußlänge (innen messen)
45 Fußlänge (außen messen)
46 Fußlänge (innen messen)
47 Fußlänge (außen messen)
48 Fußlänge (innen messen)
49 Fußlänge (außen messen)
50 Fußlänge (innen messen)
51 Fußlänge (außen messen)
52 Fußlänge (innen messen)
53 Fußlänge (außen messen)
54 Fußlänge (innen messen)
55 Fußlänge (außen messen)
56 Fußlänge (innen messen)
57 Fußlänge (außen messen)
58 Fußlänge (innen messen)
59 Fußlänge (außen messen)
60 Fußlänge (innen messen)
61 Fußlänge (außen messen)
62 Fußlänge (innen messen)
63 Fußlänge (außen messen)
64 Fußlänge (innen messen)
65 Fußlänge (außen messen)
66 Fußlänge (innen messen)
67 Fußlänge (außen messen)
68 Fußlänge (innen messen)
69 Fußlänge (außen messen)
70 Fußlänge (innen messen)
71 Fußlänge (außen messen)
72 Fußlänge (innen messen)
73 Fußlänge (außen messen)
74 Fußlänge (innen messen)
75 Fußlänge (außen messen)
76 Fußlänge (innen messen)
77 Fußlänge (außen messen)
78 Fußlänge (innen messen)
79 Fußlänge (außen messen)
80 Fußlänge (innen messen)
81 Fußlänge (außen messen)
82 Fußlänge (innen messen)
83 Fußlänge (außen messen)
84 Fußlänge (innen messen)
85 Fußlänge (außen messen)
86 Fußlänge (innen messen)
87 Fußlänge (außen messen)
88 Fußlänge (innen messen)
89 Fußlänge (außen messen)
90 Fußlänge (innen messen)
91 Fußlänge (außen messen)
92 Fußlänge (innen messen)
93 Fußlänge (außen messen)
94 Fußlänge (innen messen)
95 Fußlänge (außen messen)
96 Fußlänge (innen messen)
97 Fußlänge (außen messen)
98 Fußlänge (innen messen)
99 Fußlänge (außen messen)
100 Fußlänge (innen messen)



Erhältliche Maßblätter:

Venoflex: Allgemein

Lymphatrex: Fuß, Bein, Thorax, Arm/Hand

Cicatrex: Fuß, Bein, Thorax, Arm, Hand, Kopf

Die aktuellen Maßblätter stehen auf unserer Homepage zum Download bereit (<https://pro.thuasne.com/de-de/download-center>)

Rezeptbeispiele

- Hilfsmittel können nach wie vor zu Lasten der GKV verordnet werden.
- Richtgrößen, die für Wirtschaftlichkeitsprüfungen heranzuziehen sind, werden nicht für Hilfsmittel festgelegt.
- Bei Hilfsmitteln besteht grundsätzlich keine Gefahr von Ausgleichszahlungen an die Kassenärztlichen Vereinigungen.
- Im Rahmen der Therapiefreiheit ist freigestellt, welches Hilfsmittel verordnet wird, d. h. der Arzt kann entscheiden, welches Hilfsmittel für den Patienten am besten geeignet ist.

Rezeptvermerke:

- Indikation/Diagnose
- Hilfsmittelnummer (7-stellige Positionsnummer; 10-stellige Positionsnummer als Einzelproduktverordnung mit Begründung) oder Bezeichnung des Hilfsmittels:
- Medizinischer Kompressionsstrumpf
- Anzahl
- Strumpflänge (AD, AF, AG oder AT)
- Kompressionsklasse (KKL): I bis IV
- Fußspitze: offen oder geschlossen

wenn erforderlich zusätzlich:

- ggf. Maßanfertigung
- Zusätze: z. B. Hosenschlitz, Pelotten, Reißverschluss, Leibteil mit Kompression
- Flachgestrickt
- Befestigungen: z. B. Hautkleber, Haftband, Hüftbefestigung
- Wechselversorgung
- Begründung, falls eine vorzeitige Folgeverordnung erforderlich ist (z. B. bei erheblichen Gewichts- oder Volumenveränderungen)

Venoflex

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfs-Impl.-Spr.-St.-Reiz-Phant. mittel ausst. Bedarf Pfand		Apotheken-Nummer / K.	
Name, Vorname des Versicherten		Zusatzung		Geburtsdatum	
geb. am		17.06.10.0082		17.99.99.2008	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status	1. Verordnung		
Betreiberstellen-Nr.	Arzt-Nr.	Datum	2. Verordnung		
			3. Verordnung		
Rp. (Bitte Leerbäume durchstreichen)			Vertragsarztstempel		
Diagnose: Varikose ohne Zeichen einer CVI (C2 nach CEAP)			1 Paar, KKL 1 Kompressions-Kniestrumpf (AD) mit Haftband, geschlossene Fußspitze ggf. Maßanfertigung		
Bei Arbeitsunfall auszufüllen:			Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)		
Unfalltag			Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer		

Empfehlung zur Versorgung

Rezeptbeispiele

Lymphatrex

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Helfer-Impl.-Schul.-Soz.-Begr.-Platz		Apotheken-Nummer / K.	
Name, Vorname des Versicherten		6 7 8 9			
geb. am		Zusatzung		Gesamt-Bonus	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status	1. Verordnung		
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum	17.06.17.1022		
			2. Verordnung		
			17.99.99.2025		
			3. Verordnung		
			17.99.99.2030		
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)					
Diagnose:		1 Stück, KKL2			
Sekundäres Beinlymphödem Stadium II beidseitig		Kompressions-Strumpfhose geschlossene Fußspitze, Maßanfertigung, flachgestrickt anatomisch abgewinkelter Fuß			
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)			
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer				

Mobiderm® autofit

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Helfer-Impl.-Schul.-Soz.-Begr.-Platz		Apotheken-Nummer / K.	
Name, Vorname des Versicherten		6 7 8 9			
geb. am		Zusatzung		Gesamt-Bonus	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status	1. Verordnung		
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum	1. Verordnung		
			2. Verordnung		
			3. Verordnung		
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)					
1 Mobiderm autofit Armstrumpf					
als zusätzliche Versorgung für die Nacht + entsprechende Lymphdiagnose*					
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)			
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer				

BERATUNG & SERVICE

Kompressionsprodukte sind wichtige Begleiter im Alltag und so individuell wie die Patienten selbst. Daher ist eine einfühlsame und kompetente Beratung von entscheidender Bedeutung. Wir unterstützen Sie umfassend bei allen Fragen rund um die Kompression.

Anpassen:

Das Maßnehmen schafft eine wichtige Vertrauensbasis zwischen Patienten und Beratern. Wir vertiefen Ihre Kenntnisse über das exakte Maßnehmen und trainieren Sie mit Hilfe unserer übersichtlichen Maßformulare. Auf diese Weise bereiten wir Sie sorgfältig auf die speziellen Bedürfnisse der Patienten vor.

Schulung:

Mit unseren Schulungen zu den jeweiligen Krankheitsbildern, der Wirkungsweise unserer Kompressions-Produkte, der Versorgungs-Konzeption und dem praktischen Maßnehmen unterstützen wir Sie in der täglichen Arbeit. Darüber hinaus bieten wir diverse Seminare zur Vertiefung Ihrer Kenntnisse an. Das aktuelle Seminarprogramm finden Sie auf unserer Homepage unter www.thuasne.de

Beratung:

Unser erfahrener Innendienst steht Ihnen telefonisch bei Rückfragen zur Konzeption der Versorgung, zur Materialauswahl, zum Maßnehmen oder bei praktischen Fragen rund um den Bestellablauf sowie zum richtigen Anlegen und Tragen der Kompressionsversorgung zur Verfügung. Darüber hinaus berät Sie unser kompetenter Außendienst bei Fragen jederzeit vor Ort.

Anfertigung:

Damit die benötigte Kompressionsversorgung schnellstmöglich angefertigt werden kann, ist eine rasche und reibungslose Kommunikation von elementarer Bedeutung. Sie erreichen uns auf vielen Wegen: Für eine Wechselversorgung reicht häufig ein kurzes Telefonat. Sie können uns auch gescannte Maßblätter und Fotos per E-Mail oder per Fax senden. Am komfortabelsten ist die papierlose Bestellung über das Online-Maßportal oder die M2M-App.

Auf Basis der übermittelten Körpermaße wird anschließend computergestützt das Strick- oder Schnittmuster erstellt, das direkt an unsere Fertigungsmaschinen weitergeleitet wird.

GARANTIE UND PASSFORMVERSPRECHEN

Mit Sicherheit zur passenden Versorgung: Neben der sechsmonatigen Garantie auf Material und Wirksamkeit übernehmen wir auch für alle nach unserem Maßschema angemessenen Versorgungen die Verantwortung für eine gute Passform und den optimalen Sitz. Eventuell erforderliche Anpassungen bis hin zum

Produktersatz werden innerhalb des ersten Monats nach Versand kostenlos von uns ausgeführt. Auch darüber hinaus entstehende Anliegen behandeln wir unkompliziert und lösungsorientiert.

Sprechen Sie uns an!

UV-/SONNENSCHUTZ

Bei einer erhöhten UV-Belastung durch Sonnenlicht benötigt unsere Haut besonderen Schutz – dies gilt insbesondere für das Narbengewebe.

Aus diesem Grund empfehlen wir, auch unter der Kompressionskleidung einen geeigneten Sonnenschutz in Form von Cremes o. ä. zu verwenden.

WASCHEN & PFLEGEN

Pflegehinweise für Lymphatrex, Cicatrex und Venoflex:

Die Kompressionskleidung sollte möglichst täglich gewaschen werden, da sich im Gewebe Salbenreste, Fett, Hautschuppen und Schweiß ansammeln. Die regelmäßige Wäsche schützt vor Infektionen und vor Verschleiß.

Bei unseren Silon-TEX®-Produkten empfehlen wir, das Kleidungsstück nach dem Waschen besonders gut zu trocknen.

Pflegehinweise Mobiderm® autofit:

Vor dem Waschen bitte die Klettverschlüsse schließen.

Die Kompression sollte entweder per Handwäsche in kaltem Seifenwasser oder im Wollwaschgang gereinigt werden. Für die Maschinenwäsche empfehlen wir die Verwendung eines Wäschenetzes. Anschließend sollte die Kompression bei Raumtemperatur, fern von direkter Hitzeeinwirkung, getrocknet werden.

Falls die Produkte nicht getragen werden, ist darauf zu achten, dass diese mit geschlossenen Klettverschlüssen gelagert werden.

Detaillierte Hinweise zur Produktpflege finden Sie auf den Etiketten und in der Gebrauchsanweisung.



WINGS FOR YOUR HEALTH

Thuasne Deutschland GmbH

Sydney Garden 9 · D-30539 Hannover
Tel.: +49 511 20119-0 · Fax: +49 511 20119-177
kundenservice@thuasne.de · www.thuasne.de

Hauptstraße 16 · D-35099 Burgwald
Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980

Kundenservice-Hotline:
Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
kundenservice@thuasne.de

Kundenservice Serienprodukte:
Tel.: +49 511 20119-205 · Fax: +49 511 20119-177
bestellung@thuasne.de

Kundenservice Maßprodukte:
Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980
massbestellung@thuasne.de

Alle in diesem Dokument genannten Medizinprodukte sind gemäß der europäischen Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte CE-gekennzeichnet, sofern sie nicht ausdrücklich als „NICHT CE-MARKIERT“ gekennzeichnet sind. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, Indikationen und Kontraindikationen des Produkts sorgfältig durch.
Stand: 07/2025. Thuasne Deutschland GmbH, D-30539 Hannover.



TM1343202BDD242_2026-04