

MOBIDERM® SUR-MESURE PATIENT

BAS ET CHAUSSETTES


1- Positionner les repères anatomiques



Sélectionner les repères anatomiques nécessaires selon le modèle de vêtement choisi.

Positionner les repères sur la face externe de la jambe.


- (A) À la tête des métatarses
- (Y) Entre le cou-de-pied et la tubérosité du calcaneum
- (Y1) Projection au sol du repère Y
- (B) Au point le plus fin de la cheville
- (B1) À la naissance des muscles jumeaux
- (C) Au point le plus fort du mollet
- (D) À la tête du péroné (3 - 4 cm sous la rotule)
- (E) Au milieu de la rotule
- (G) À l'arrêt souhaité du vêtement, maximum sous le pli fessier
- (F) Équidistant entre les repères G et E
- (H) Point de la hauteur souhaitée à partir du point G, en cas d'ajout d'un haut en biais (entre 3 cm et 15 cm).

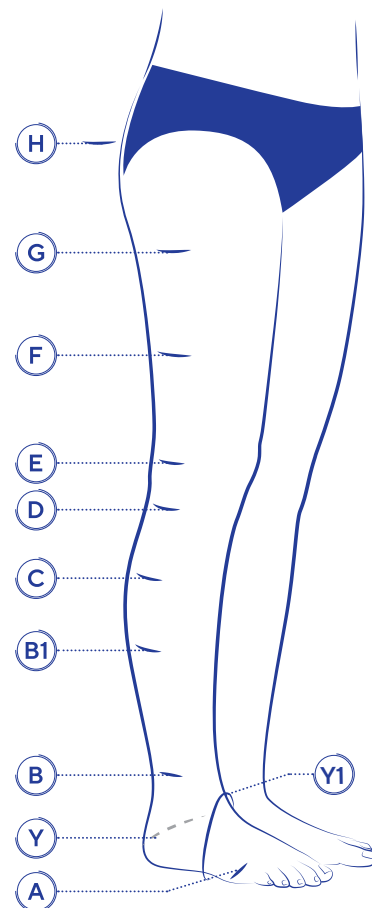

2- Mesurer les circonférences




Prendre les mesures en contact peau sans tirer sur le mètre ruban.

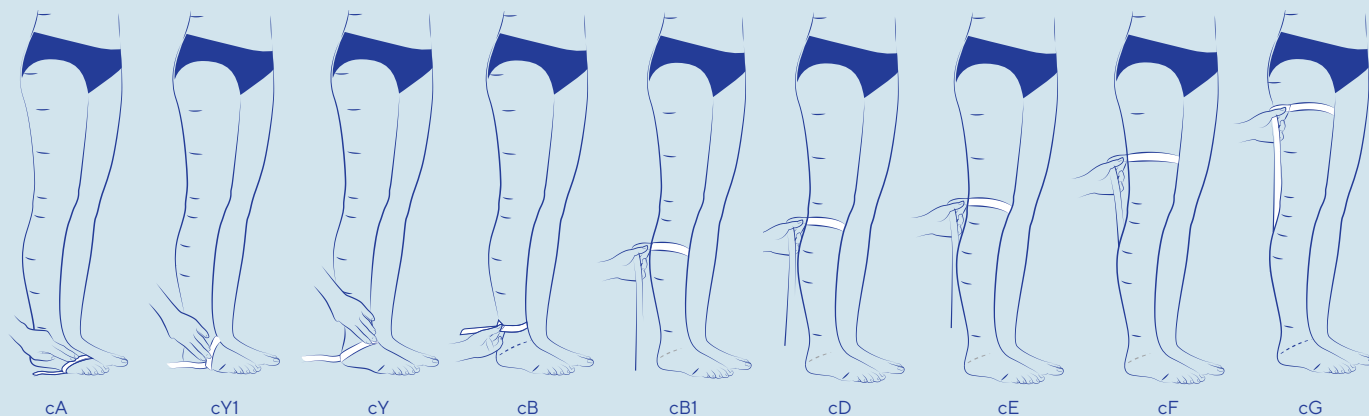

3- Mesurer les hauteurs



Prendre les mesures sur la face externe de la jambe avec le mètre ruban posé sur la peau.

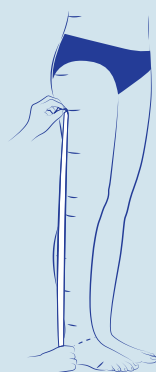

Hauteurs de la jambe depuis le sol : ℓB , $\ell B1$, ℓC , ℓD , ℓE , ℓF et ℓG



Longueur de pied externe totale



Longueur de pied interne totale



$\ell Y1$