

# LYMPHATREX Expert

## MITAINE ET GANT


### 1- Positionner les repères anatomiques



Sélectionner les repères anatomiques nécessaires selon le modèle de vêtement choisi.

Positionner les repères sur l'axe médian de la face palmaire de la main.


- (C) Au pli de flexion du poignet
- (C1) Minimum à 2 cm et maximum à 6 cm du repère C
- (D) À l'arrêt souhaité du vêtement. Minimum à 6 cm du repère C et maximum jusqu'au coude
- (B) Dans l'axe de la commissure du pouce
- (A) À la tête des métacarpes
- À la commissure du majeur
- (X) Au milieu de la première phalange de chaque doigt
- (Z) À l'arrêt souhaité du vêtement. Eviter d'arrêter le vêtement sur l'ongle ou sur une articulation.

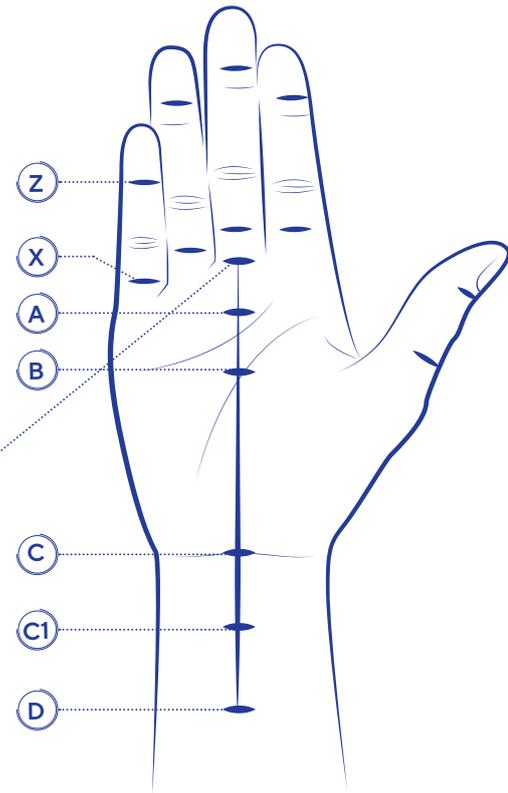

### 2- Mesurer les circonférences



Prendre les mesures en contact peau sans tirer sur le mètre ruban.

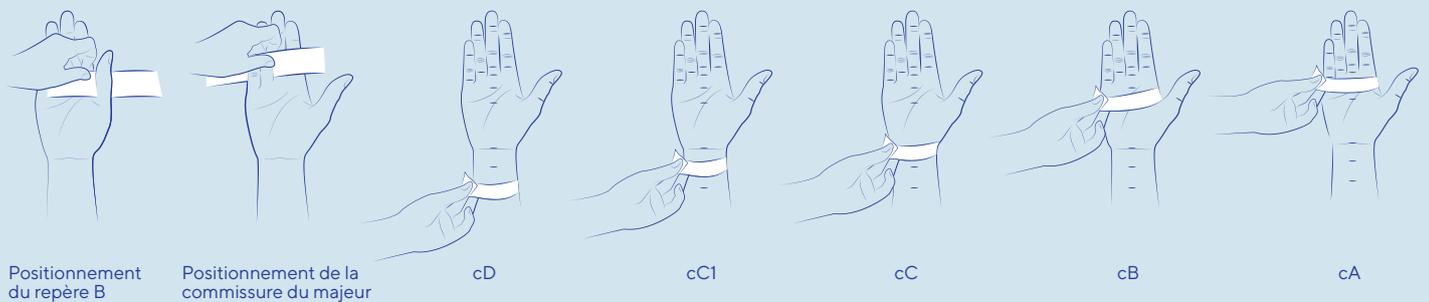

Positionnement du repère B

Positionnement de la commissure du majeur

cD

cC1

cC


cB

cA


### 3- Mesurer les hauteurs



Prendre les mesures sur la face palmaire de la main avec le mètre ruban posé sur la peau.

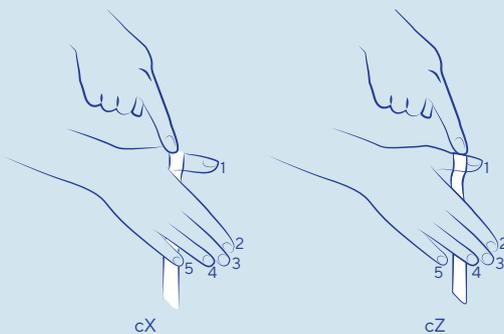

Circonférences des doigts :  
Utiliser un mètre lasso.  
Pour un gant : cX1, 2, 3, 4, 5 et cZ1, 2, 3, 4, 5  
Pour une mitaine : cX1 et cZ1

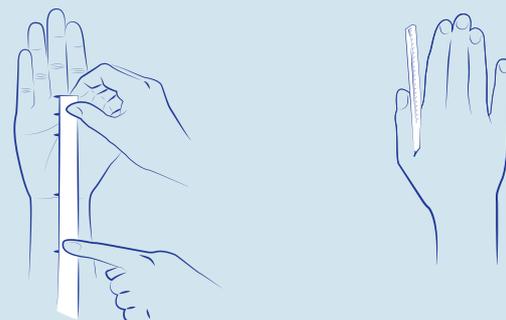

Hauteurs de la main :  
cC1 : du repère C à C1  
cD : du repère C à D  
cB : du repère C à B  
cA : du repère C à A  
cC : du repère C à la commissure du majeur

Hauteurs des doigts :  
Utiliser un règle souple sans appliquer de pression. Mesure de la commissure du doigt au repère Z. Minimum 2 cm.  
Pour un gant : cXZ1, 2, 3, 4, 5  
Pour une mitaine : cXZ1