

LYMPHATREX Revolution

JAMBES


1- Positionner les repères anatomiques



Sélectionner les repères anatomiques nécessaires selon le modèle de vêtement choisi.

Positionner les repères sur la face externe de la jambe.

- (A) À la tête des métatarses
- (Y) Entre le cou-de-pied et la tubérosité du calcaneum
- (B) Au point le plus fin de la cheville
- (B1) À la naissance des muscles jumeaux
- (C) Au point le plus fort du mollet
- (D) À la tête du péroné (3 - 4 cm sous la rotule)
- (E) Au milieu de la rotule
- (F) Équidistant entre les repères G et E
- (G) Pour le bas cuisse : est localisé à la hauteur souhaitée de l'appareillage
Pour le bas cuisse avec option couvre-hanche : au pli fessier

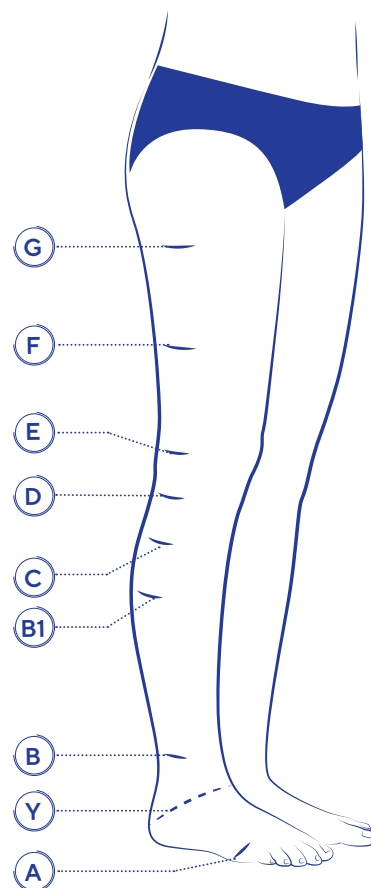


Important : ne pas oublier de mesurer et d'indiquer les longueurs de pied (interne/externe).

2- Mesurer les circonférences



Le mètre ruban doit être tenu fermement (attention à ne pas léser la peau). La pression doit être adaptée à la tolérance du patient.

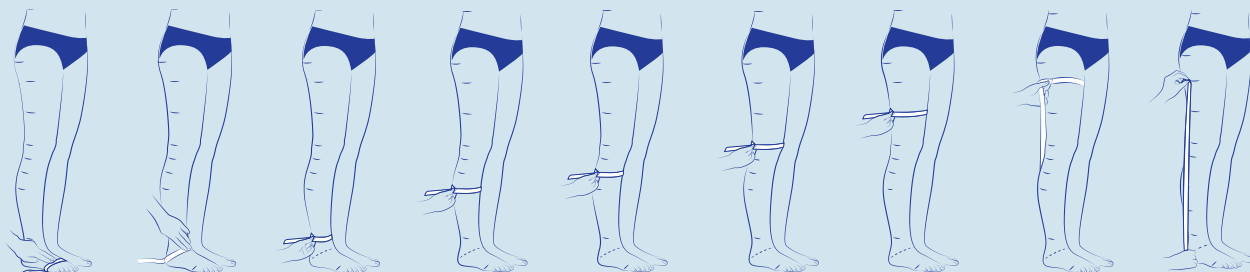

cA

cY

cB

cB1

cD

cE

cF


cG

Hauteurs de la jambe depuis le sol :
cB, cB1, cC, cD, cE, cF, cG.

3- Mesurer les hauteurs



Prendre les mesures sur la face externe de la jambe avec le mètre ruban posé sur la peau.

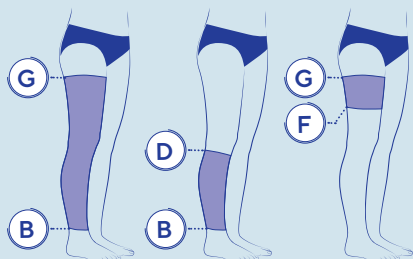

G


D

G

F

B

B

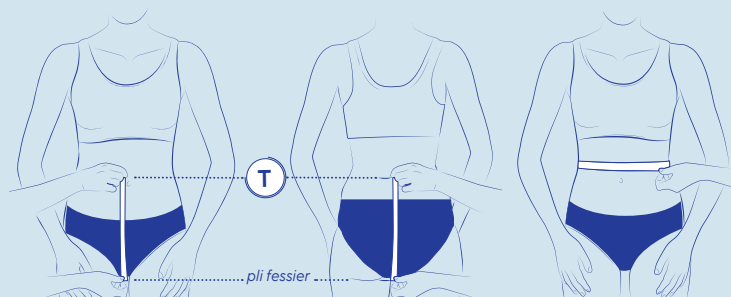

T

pli fessier

cT

Hauteur cGT avant :
prendre cGT du report du pli fessier jusqu'à la hauteur souhaitée.

Hauteur cGT arrière :
prendre cGT du pli fessier jusqu'à la hauteur souhaitée.



Longueur de pied
interne totale

Longueur de pied
externe totale

Pour les manchons :
circonférences cB à cG et hauteurs cG à cB
à remplir en fonction du modèle de manchon.

Pour l'option couvre-hanche :
ajouter les mesures de la circonférence cT
et des hauteurs cGT avant et arrière.

Pied fermé :
longueur de pied totale.
Pied ouvert :
longueur de vêtement souhaitée.