



THUASNE

ROM-R reservdelskit

Reservdelar till post op-ortosen ROM-R



A x 4



B x 8



C x 2



En patient – flera användningar

Beskrivning

Detta reservdelskit innehåller:

- 4 st remmar med alligatorfästen **A**
- 8 st polstringskuddar **B**
- 2 kondylkuddar **C**

Materialkomposition : etenvinylacetat, polyamid, polyester

Avsedd användning:

Detta reservdelskit passar endast post op-ortosen ROM-R och används i syfte att byta ut det polstringsmaterial och remmar som levererades med ortosen.

Läs noggrant igenom indikationer, kontraindikationer och föreskrifter i bruksanvisningen som levererades med ROM-R splint innan användning.

Bruksanvisning/placering

Polstringskuddar:

För ökad komfort har mjuka polstringskuddar är placerats på alla ytor på ortosen som är i direkt kontakt med huden.

• Ta bort de befintliga polstringskuddarna genom att ta tag i dem och dra bort dem från ortosens ram.

• Ersätt de befintliga polstringskuddarna med nya från detta kit genom att fästa dem på samma ytor.

• Ersätt kondylkuddarna på samma sätt.

Remmarna:

Remmarna används för att säkerställa att ortosen sitter på plats, väl anpassad efter patientens ben.

- För att ta bort de befintliga remmarna:
 - Låt ortosens snabbfästen sitta kvar på ortosen.
 - För remmen genom snabbfästet.
 - Lossa den del som fortfarande är fäst och för bort remmen helt.
- För att ersätta remmarna:
 - Fäst den nya remmen på samma sätt som den befintliga remmen.
 - Dra remmen runt ortosen och för in den i snabbfästet.
 - Om alligatorfästet hamnat på fel sida av remmen, lossa det och fäst det på den rätta sidan.

Underhåll/skötsel

Se bruksanvisningen som levererades med post op-ortosen ROM-R för ytterligare information.

Produkten ska kasseras enligt lokala föreskrifter.



©Thuasne - 2019701 (2020-11)

www.thuasne.com
www.thuasne.com/global-contact